



## ACC – Ein komfortables Fahrerlebnis.

Der adaptive Tempomat (ACC) hält in Kombination mit dem intelligenten Bremssystem (IBS) die von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit in jedem Gelände. Sie müssen also weder bergauf zusätzlich beschleunigen noch bergab bremsen, um mit Ihrer gewünschten Geschwindigkeit zu fahren. Komfortabler geht's nicht.



Bergauf

Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit durch die automatisierte Erhöhung des Drehmoments an Steigungen.



Ebene

Im flachem Gelände hält der Tempomat die gewünschte Geschwindigkeit und reduziert den Akkuverbrauch.



Bergab

Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit durch Aktivierung der Motorbremse. Zusätzlich wird der Akku aufgeladen.

### Mehr Fahrkomfort in allen Situationen

Der adaptive Tempomat ACC erleichtert das Fahren der Triride Zugeräte insbesondere auf langen Strecken, bei Bergab-Fahrten und für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion. Durch die Aktivierung des ACC wird die gewünschte Geschwindigkeit durchgängig gehalten.

### Einfache Bedienung durch Tastendruck

Um den adaptiven Tempomat ACC des Triride zu aktivieren, genügt ein Tastendruck. ACC kann während der Fahrt ab einer Geschwindigkeit von 2 km/h jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden, sodass auch weniger erfahrene Nutzer das System bequem für ihren individuellen Fahrkomfort nutzen können.

### Sofortige Deaktivierung durch eine beliebige Aktion

Die adaptive Geschwindigkeitsregulierung wird sofort und vollautomatisch deaktiviert, wenn Sie Ihr Triride manuell bremsen oder beschleunigen, was für 100%ige Sicherheit sorgt.

### Optimiertes Akku-Management

Die adaptive Geschwindigkeitsregulierung optimiert den Energieverbrauch in jeder Fahrsituation und passt die Motorleistung schrittweise an, um die Geschwindigkeit konstant zu halten. Der adaptive Tempomat optimiert aber nicht nur den Energieverbrauch, er gewinnt sie in Kombination mit dem intelligenten Bremssystem IBS sogar zurück. Auf Bergab-Fahrten nutzt ACC nämlich die Bremsenergie zum Wiederaufladen des Akkus, sodass die Reichweite erhöht wird.



## Was ist der Unterschied zwischen dem Basistempomat aus der Grundausstattung und dem Adaptiven Tempomat ACC?

Der Basistempomat aus der Grundausstattung hält die Geschwindigkeit in der Ebene und bergauf. Die Geschwindigkeitsregulierung bergab inklusive der perfekten Kombination mit dem Intelligenten Bremssystem IBS mit Energierückgewinnung ist nur mit dem Adaptiven Tempomat ACC möglich.