



EcoDrive – Mehr Unabhängigkeit.

Das innovative EcoDrive-System verbessert die Kraftübertragung und Traktion. Mit dem EcoDrive können Sie individuell einen der fünf Fahrmodi über das Display auswählen, wodurch eine Steigerung der Reichweite von bis zu 40% möglich ist.



20% der maximalen Power
max. Steigung bei Bergauffahrten 8%¹
Reichweitenerhöhung um bis zu 40%



30% der maximalen Power
max. Steigung bei Bergauffahrten 10%¹
Reichweitenerhöhung um bis zu 30%



50% der maximalen Power
max. Steigung bei Bergauffahrten 15%¹
Reichweitenerhöhung um bis zu 20%

Allgemeines

Die Modi 1 | 2 | 3 ermöglichen große Energieeinsparungen und eine noch ruhigere und entspanntere Fahrt.

Die Modi 4 | 5 ermöglichen die anspruchsvollsten Situationen wie Bergstrecken oder steile Anstiege zu bewältigen.

Mithilfe der 5 Anzeigefunktionen wird das entsprechende Leistungsniveau dargestellt und die Reichweite verbessert.

¹Es wird empfohlen, keine Steigungen bergauf oder bergab zu fahren, die größer sind als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen. Die tatsächliche Steigung, die überwunden werden kann, hängt vom verwendeten Modell, der Fähigkeit des Fahrers, der Art der Straßenoberfläche, dem Nutzergewicht, dem Rollstuhlmodell und dem Verschleißzustand des Vorderreifens ab.



75% der maximalen Power
max. Steigung bei Bergauffahrten 20%¹
Reichweitenerhöhung um bis zu 5%



100% der maximalen Power
max. Steigung bei Bergauffahrten 20%¹
Reichweitenerhöhung 0%