


T1-2

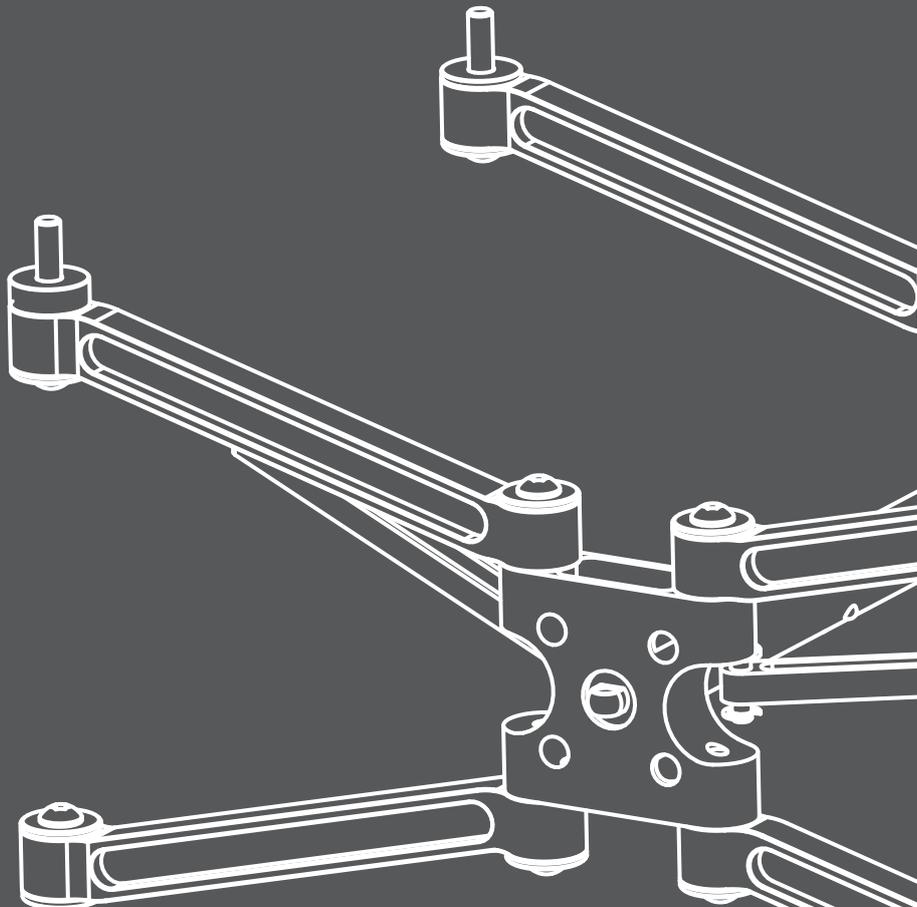

## **TRAVELER T1-2**

*Ersatzteilkatalog ab Baujahr 2003*

WICHTIGE PREISINFORMATION - bitte beachten! **PROACTIV**<sup>®</sup>

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem PRO ACTIV Webshop  
unter: <https://shop.proactiv-gmbh.de/>

Betreffend des Zugangs zu unserem Ersatzteil-Webshop bitten wir Sie, sich mit unserem  
Außendienst in Verbindung zu setzen.

Die bestehenden Ersatzteilkataloge werden nicht mehr aktualisiert.







<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Traveler Rahmen</b> .....	<b>1 - 2</b>
<b>Traveler Faltmechanismus</b> .....	<b>1 - 2</b>
<b>Kniehebelbremse</b> .....	<b>3 - 4</b>
Halteleiste .....	<b>4</b>
Kniehebelbremskörper .....	<b>4</b>
Bremshebel .....	<b>4</b>
Bremsbolzen .....	<b>4</b>
<b>Rückenlehne</b> .....	<b>5 - 8</b>
Rückenlehne vormontiert .....	<b>6</b>
Rückenbespannung .....	<b>6</b>
Rückenlehne Einzelteile .....	<b>6</b>
Rückenquerbügel .....	<b>6</b>
Schiebegriffe .....	<b>7 - 8</b>
<b>Sitzbespannung</b> .....	<b>8</b>
<b>Seitenbleche</b> .....	<b>9 - 10</b>
Seitenblech .....	<b>10</b>
Seitenblechbefestigung .....	<b>10</b>
<b>Kleiderschutz und Armlehnen</b> .....	<b>11 - 12</b>
Kleiderschutz .....	<b>12</b>
Armlehnen .....	<b>12</b>
<b>Fußbügel</b> .....	<b>13 - 22</b>
Fußbügel durchgehend, faltbar, abnehmbar .....	<b>13 - 14</b>
Fußbügel durchgehend, einseitig hochklappbar, nach außen schwenkbar, abnehmbar .....	<b>15 - 16</b>
Fußstütze geteilt, seitlich hochklappbar, schwenkbar, abnehmbar .....	<b>17 - 18</b>
Fußstütze "Swing Away", nach außen schwenkbar, abnehmbar .....	<b>19 - 20</b>
Zubehör Fußbügel / Wadenband .....	<b>22</b>
<b>Kippstützen / Transitrollen</b> .....	<b>23 - 24</b>
Adapter .....	<b>24</b>
Kippstützen .....	<b>24</b>
Transitrollen .....	<b>24</b>

	<b>Seite</b>
<b>Lenkradbefestigung</b> .....	<b>25 - 30</b>
<b>Lenkrad-Lagerblock</b> .....	<b>26</b>
<b>Lenkradgabel mit Schraubachse</b> .....	<b>27</b>
<b>Lenkradgabel mit Steckachse</b> .....	<b>28</b>
<b>Lenkräder</b> .....	<b>30</b>
<b>Federgabel</b> .....	<b>31 - 34</b>
<b>Antriebsradbefestigung</b> .....	<b>35 - 38</b>
<b>Antriebsradbefestigungsplatte</b> .....	<b>36</b>
<b>Antriebsradbuchse</b> .....	<b>36</b>
<b>Antriebsrad-Steckachsen</b> .....	<b>38</b>
<b>Sturzadapter</b> .....	<b>38</b>
<b>Spurdistanz</b> .....	<b>38</b>
<b>Antriebsräder</b> .....	<b>39 - 42</b>
<b>Eingespeichte Felgen</b> .....	<b>40</b>
<b>Greifringe</b> .....	<b>40</b>
<b>Bereifung</b> .....	<b>41</b>
<b>Schläuche</b> .....	<b>42</b>
<b>Greifringüberzüge</b> .....	<b>42</b>
<b>Speichenschutz</b> .....	<b>42</b>
<b>Zubehör Antriebsräder</b> .....	<b>42</b>
<b>Naben</b> .....	<b>43</b>
<b>Speichen</b> .....	<b>43</b>
<b>AGB</b> .....	<b>44</b>

**Jeder ausgelieferte Rollstuhl ist bei uns archiviert!**



**Aufgrund der verschiedenen Ausführungen und Größen der Rollstühle und deren Optionen benötigen wir von Ihnen die gewünschte Größe sowie die Produkt-Nr. mit den erforderlichen Angaben!**

**Werden nur die Produkt-Nr. und keine weiteren Ausführungs- bzw. Größenänderungen angegeben, liefern wir die Ersatzteile nach Auslieferungszustand des Rollstuhles!**

**Sofern am Rollstuhl nachträglich Umbauten oder Änderungen vorgenommen wurden, sind uns diese zu benennen, um Falschsendungen zu vermeiden!**

**Bei Umtausch und Rücksendungen bitte die AGB Ziffer 13 beachten!**

# Rahmen und Faltmechanismus

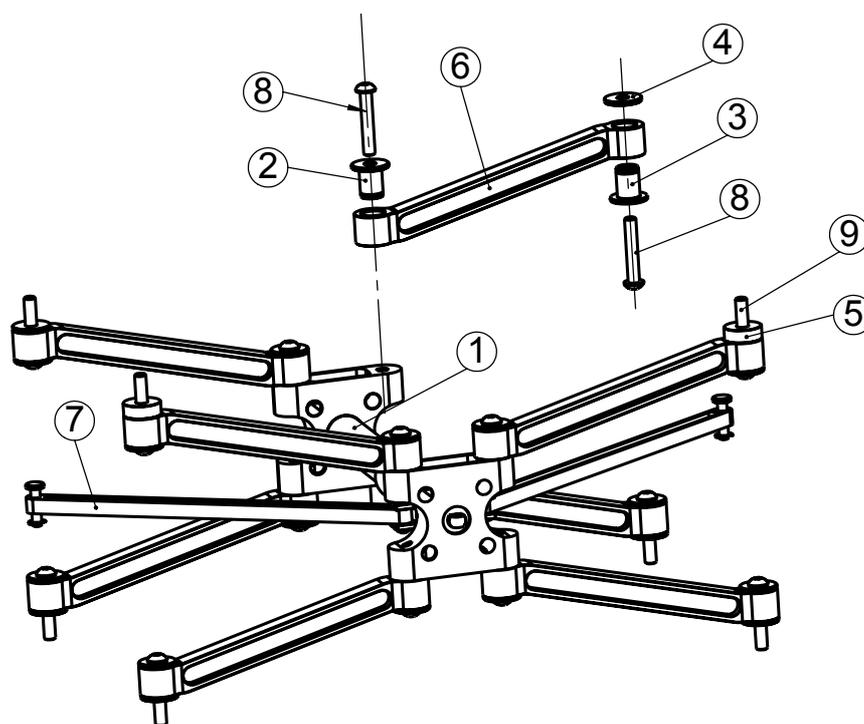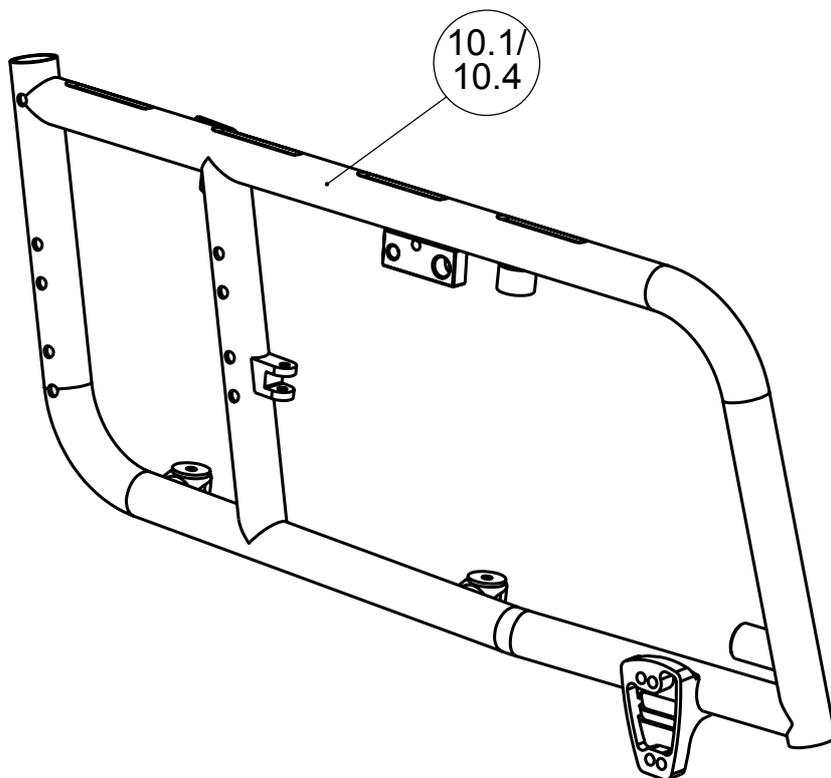



## Traveler T1-2 Rahmen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
10.1	8030 110 000	TRAVELER T1-2 Rahmenseitenteil G-Form, kurz (50cm), pulverbeschichtet	1 Paar
10.2	8030 110 002	TRAVELER T1-2 Rahmenseitenteil G-Form, lang (54cm), pulverbeschichtet	1 Paar
10.3	8030 110 004	TRAVELER T1-2 Rahmenseitenteil V-Form, kurz (50cm), pulverbeschichtet	1 Paar
10.4	8030 110 006	TRAVELER T1-2 Rahmenseitenteil V-Form, lang (54cm), pulverbeschichtet	1 Paar
	8030 110 010	Rahmenschutzgleiter, Kunststoff schwarz	1 Paar
	8030 110 061	Rahmen Reflector Folie rot (3M), selbstklebend	2 Stück


## Traveler Faltmechanismus

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 110 100	Faltmechanismus incl. Drehpunkte, Präzisions-Distanzscheiben und Befestigungsschrauben	1 Stück
1	8030 110 110	Zentralrohr Faltmechanismus, incl. Befestigungsschrauben	1 Stück
2	8030 110 120	Drehpunkt Bohrungs-Ø 6mm	1 Stück
3	8030 110 121	Drehpunkt Bohrungs-Ø 7,5mm	1 Stück
4	8030 110 122	Präzisions-Distanzscheibe 2mm	1 Stück
5	8030 110 123	Präzisions-Distanzscheibe 7mm	1 Stück
6	8030 110 125	Faltarm, incl. Befestigungsschrauben	1 Stück
7	8030 110 128	S-Strebe incl. Sicherungsstift, Sicherungsscheibe und Befestigungsschrauben	1 Stück
	8030 110 129	Niro-Kugeln Ø 4mm für Verriegelungsmechanismus Zentralrohr	6 Stück
8	8030 110 220	M6 x 35 Linsenkopfschraube mit Innensechskant DIN 7380, fleckbeschichtet	1 Stück
9	8030 110 221	M6 x 40 Linsenkopfschraube mit Innensechskant DIN 7380, fleckbeschichtet	1 Stück


# Kniehebelbremse

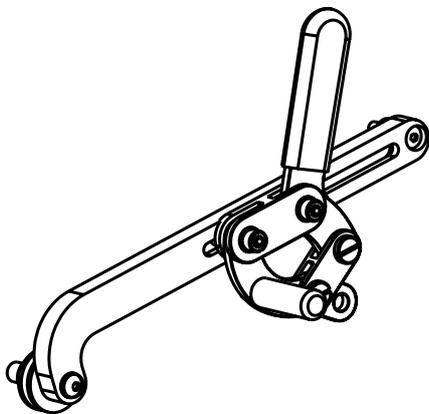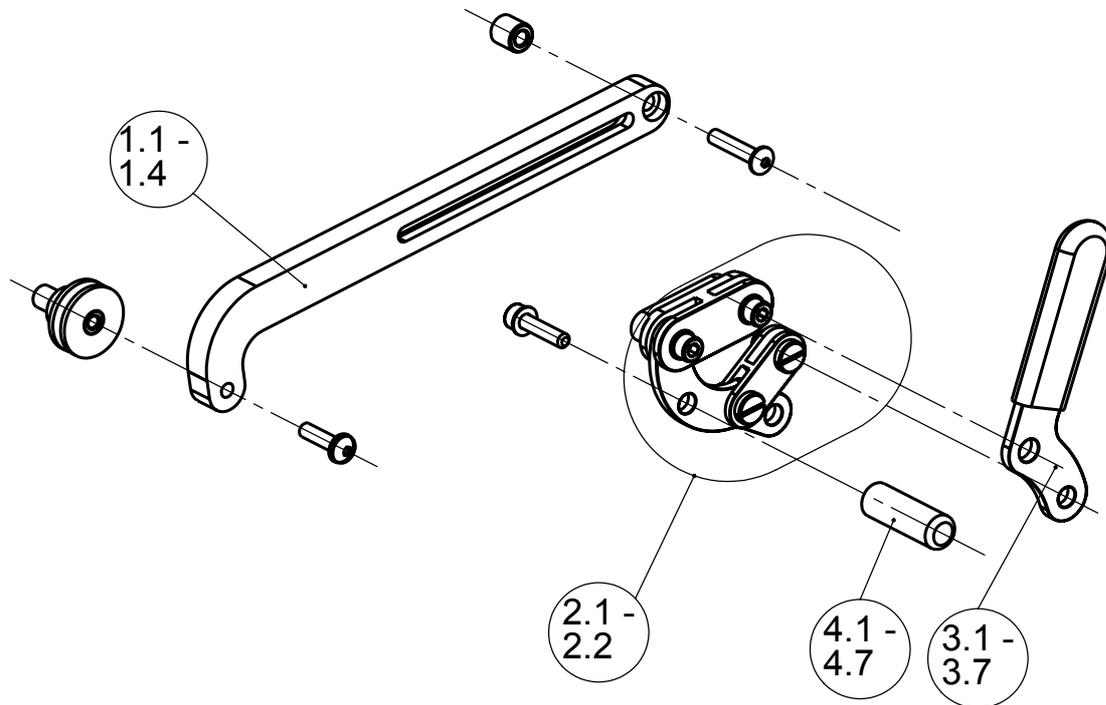


dargestellt Bremshebel Standard  
3.1

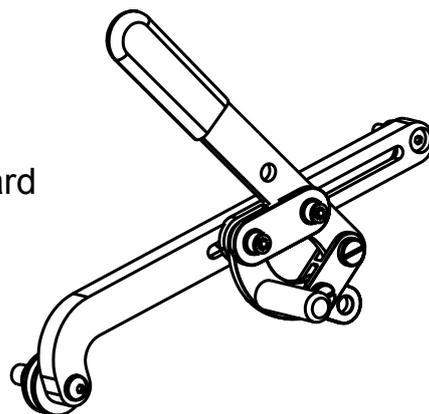

dargestellt Bremshebel lang  
3.4

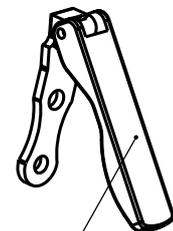

3.8 -  
3.9

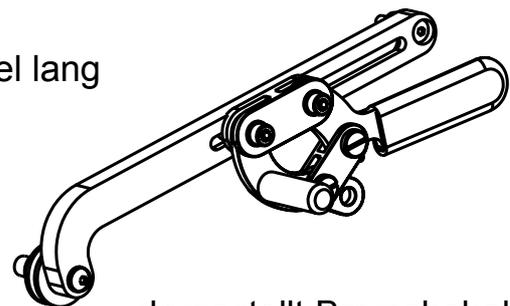

dargestellt Bremshebel tief  
3.7

## Kniehebelbremse

### Halteleiste

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8030 715 000	Halteleiste rechts, kurzer Verstellbereich mit Befestigungsmaterial	1 Stück
1.2	8030 715 001	Halteleiste links, kurzer Verstellbereich mit Befestigungsmaterial	1 Stück
1.3	8030 715 100	Halteleiste rechts, langer Verstellbereich mit Befestigungsmaterial	1 Stück
1.4	8030 715 101	Halteleiste links, langer Verstellbereich mit Befestigungsmaterial	1 Stück

### Kniehebelbremskörper

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
2.1	8030 713 001	Kniehebelbremskörper rechts (ohne Bremshebel, Bremsbolzen und	1 Stück
2.2	8030 713 002	Kniehebelbremskörper links ohne Bremshebel, Bremsbolzen und	1 Stück


### Bremshebel

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3.1	8030 716 000	Bremshebel Standard (rechts oder links)	1 Stück
3.2	8030 716 002-001	Bremshebel Standard rechts, 20° ausgestellt	1 Stück
3.3	8030 716 002-002	Bremshebel Standard links, 20° ausgestellt	1 Stück
3.4	8030 716 001	Bremshebel lang (rechts oder links)	1 Stück
3.5	8030 716 003-001	Bremshebel lang, rechts, 20° ausgestellt	1 Stück
3.6	8030 716 003-002	Bremshebel lang, links, 20° ausgestellt	1 Stück
3.7	8030 716 004	Bremshebel tief (rechts oder links)	1 Stück
3.8	8030 706 008-001	Bremshebel abklappbar, Länge 9 cm, rechts	1 Stück
3.9	8030 706 008-002	Bremshebel abklappbar, Länge 9 cm, links	1 Stück

### Bremsbolzen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
4.1	8030 717 000-001	Bremsbolzen Aluminium, Länge 23,5mm für 1° Sturz	1 Stück
4.2	8030 717 000-002	Bremsbolzen Aluminium, Länge 29,5mm für 4° Sturz	1 Stück
4.3	8030 717 000-003	Bremsbolzen Aluminium, Länge 36,5mm für 6° Sturz	1 Stück
4.4	8030 717 100	Bremsbolzen Aluminium, Länge nach Maßangabe	1 Stück
4.5	8030 717 010-001	Bremsbolzen Edelstahl, Länge 23,5mm für 1° Sturz	1 Stück
4.6	8030 717 010-002	Bremsbolzen Edelstahl, Länge 29,5 mm für 4° Sturz	1 Stück
4.7	8030 717 010-003	Bremsbolzen Edelstahl, Länge 36,5mm für 6° Sturz	1 Stück

# Rückenlehne

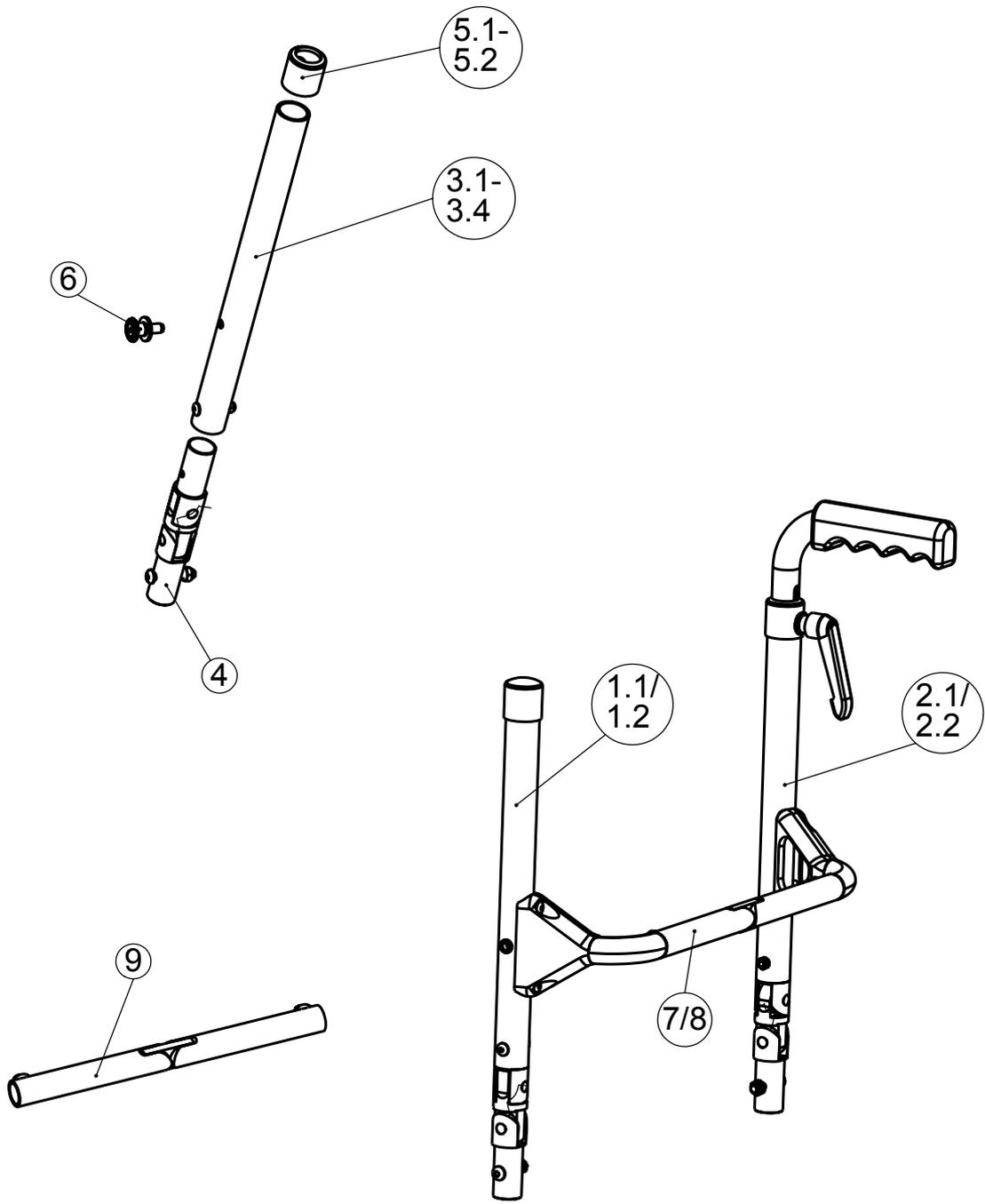

## Rückenlehne

### Rückenlehne vormontiert

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8030 410 100	Rückenlehne bis RH 39cm, vorbereitet für Montage ohne Schiebegriffe	1 Stück
1.2	8030 410 101	Rückenlehne ab RH 40cm, vorbereitet für Montage ohne Schiebegriffe	1 Stück
2.1	8030 410 200	Rückenlehne bis RH 39cm, vorbereitet für Montage mit Schiebegriffen	1 Stück
2.2	8030 410 201	Rückenlehne, ab RH 40cm, vorbereitet für Montage mit Schiebegriffen	1 Stück

jeweils Rückenrohr rechts und links, Rückenbespannung und Rückenpolster, ohne Rückenquerbügel

### Rückenbespannung

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 814 100	Anpassbare Rückenbespannung, bis RH 39cm	1 Stück
	8030 814 101	Anpassbare Rückenbespannung, ab RH 40cm	1 Stück
	8030 815 100	Rückenpolster Standard, schwarz (vorne 10mm, hinten 5mm gepolstert)	1 Stück
	8030 815 101	Rückenpolster Comfort, schwarz (vorne 20mm, hinten 5mm gepolstert)	1 Stück
	8030 815 102	Rückenpolster Light, schwarz (vorne 10mm, hinten 0mm gepolstert)	1 Stück
	8030 815 103	Rückenquerband 5cm zur Erhöhung der Rückenhöhe)	1 Stück



### Rückenlehne Einzelteile

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3.1	8030 411 000	Rückenrohr rechts, vorbereitet für Montage ohne Schiebegriffe	1 Stück
3.2	8030 411 001	Rückenrohr links, vorbereitet für Montage ohne Schiebegriffe	1 Stück
3.3	8030 411 100	Rückenrohr rechts, vorbereitet für Montage mit Schiebegriffen	1 Stück
3.4	8030 411 101	Rückenrohr links, vorbereitet für Montage mit Schiebegriffen	1 Stück
4	8030 412 000	Rückengelenk	1 Stück
5.1	8030 410 015	Abschlußkappe Kunststoff mit 20mm Bohrung für Rückenrohre mit Schiebegriffen	1 Stück
5.2	8030 410 016	Abschlußkappe Kunststoff geschlossen für Rückenrohre ohne Schiebegriffe	1 Stück
6	8030 413 050	Seitenblechdrehpunkt (Senkschraube M5x25 ISO 7991 fleckbeschichtet, U-Scheibe und Einnietmutter)	1 Stück
	8030 413 051	Seitenblechdrehpunkt verstärkte Ausführung (Linsenkopfschraube M6x25 ISO 7380, U-Scheibe und Einnietmutter)	1 Stück
	8030 411 200	Verstärkungsinlett Rückenrohr	1 Stück

### Rückenquerbügel

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
7	8030 415 002	Rückenquerbügel, Verriegelung mit Federrastmechanismus	1 Stück
8	8030 415 003	Rückenquerbügel, mit Schiebegriffhalter rückverlagert, Verriegelung mit Federrastmechanismus	1 Stück
9	8030 415 004	Federrastmechanismus mit Querrohr für Rückenquerbügel	1 Stück

# Schiebegriffe

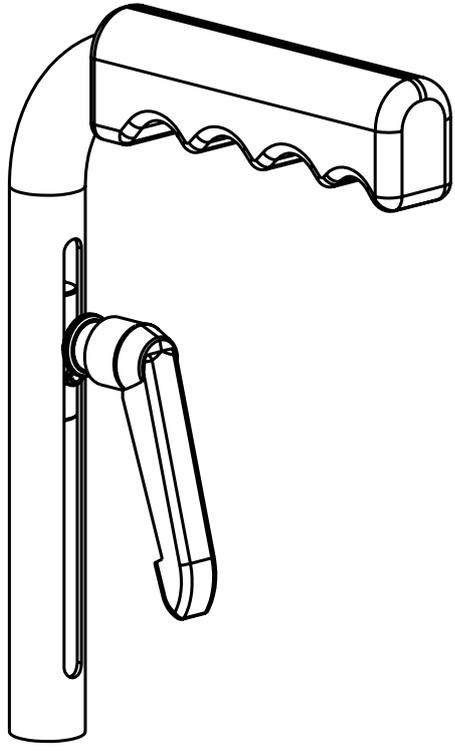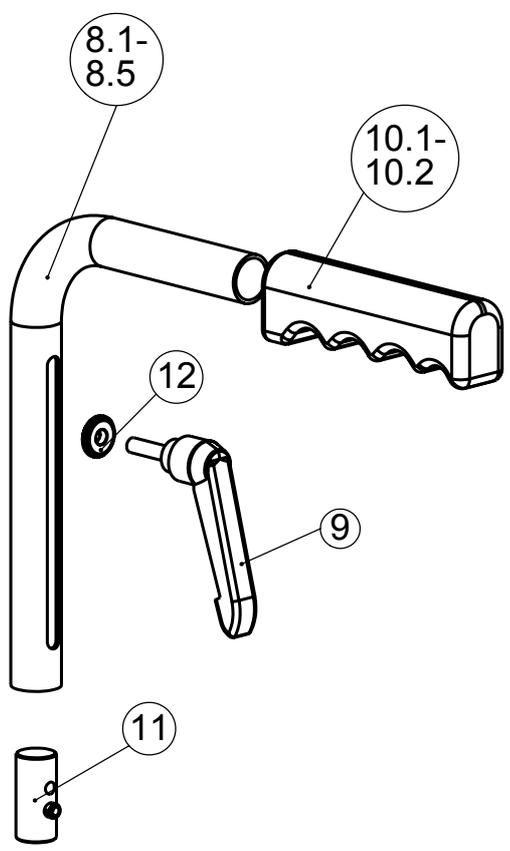

## Schiebegriffe / Sitzbespannung





### Schiebegriffe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
8.1	8030 416 000	Aluminium Schiebegriff fest montiert mit Foam-Grip Überzug	1 Stück
8.2	8030 416 001	Schiebegriff höhenverstellbar, Verstellbereich 7cm Grifflänge 13cm, mit Lamellengriff und Klemmhebel	1 Stück
8.3	8030 416 002	Schiebegriff höhenverstellbar, Verstellbereich 11cm Grifflänge 13cm, mit Lamellengriff und Klemmhebel	1 Stück
8.4	8030 416 200	Schiebegriff höhenverstellbar, Verstellbereich 7cm Grifflänge 18cm (für Trommelbremse)	1 Stück
8.5	8030 416 201	Schiebegriff höhenverstellbar, Verstellbereich 11cm Grifflänge 18cm (für Trommelbremse)	1 Stück
8.6	8030 416 004	Sicherheitsschiebegriff höhenverstellbar Länge 350mm (für rückberlagerte Schiebegriffausführung)	1 Stück
8.7	8030 416 300	Schiebegriffhalter für rückverlagerte Schiebegriff-Ausführung, mit Klemmhebel	1 Stück
9	8030 416 500	Klemmhebel M6 x 23	1 Stück
10.1	8030 416 510	Foam-Grip Schiebegriffüberzug	1 Paar
10.2	8030 416 511	Lamellen-Schiebegriffüberzug	1 Paar
11	8030 411 104	Befestigungsinlett M6	1 Stück
12	8030 411 116	Klemmscheibe Alu 6mm	1 Stück

### Sitzbespannung

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 811 100	Sitzbespannung offenes Gurtsystem	1 Stück
	8030 811 200	Sitzbespannung geschlossen	1 Stück
	8030 811 300	Klemmplatte Alu für Sitzbespannung	1 Stück
	8030 812 827	Halterrohr Sitzbespannung Aluminium 275mm	1 Stück
	8030 812 837	Halterrohr Sitzbespannung Aluminium 375mm	1 Stück

# Seitenbleche

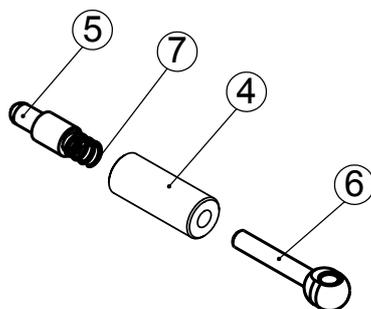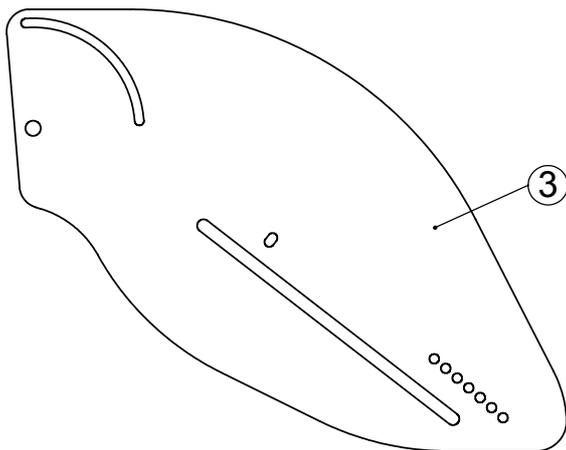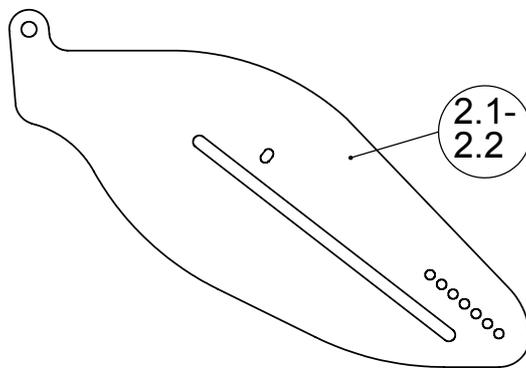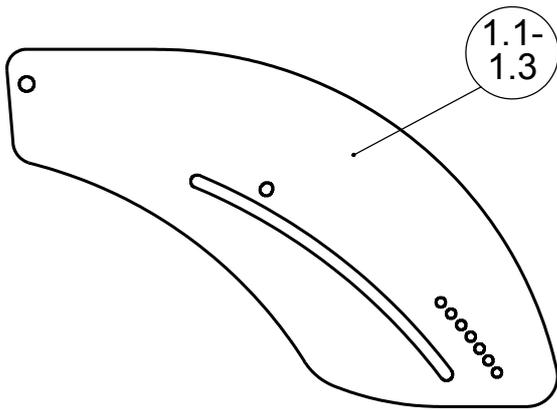

## Seitenbleche

### Seitenblech


Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8030 413 000	Seitenblech Alu, 7 Rastpositionen, Standardform Farbe: anthrazit pulverbeschichtet	1 Stück
1.2	8030 413 001	Seitenblech Alu, 8 Rastpositionen, Standardform Farbe: anthrazit pulverbeschichtet	1 Stück
1.3	8030 413 002	Seitenblech Alu, 9 Rastpositionen, Standardform (bis max. 80kg Körpergewicht) Farbe: anthrazit pulverbeschichtet	1 Stück
2.1	8030 413 003	Seitenblech Alu, 7 Rastpositionen, niedere Ausführung	1 Stück
2.2	8030 413 004	Seitenblech Alu, 8 Rastpositionen, niedere Ausführung	1 Stück
3	8030 413 005	Seitenblech Alu, 10 Rastpositionen, lange, hohe Ausführung, Farbe: schwarz pulverbeschichtet	1 Stück

jeweils mit Kantenschutz und Seitenblechdrehpunkt,

### Seitenblechbefestigung

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 413 050	Seitenblechdrehpunkt (Senkschraube M5x25 ISO 7991 fleckbeschichtet, U-Scheibe und Einnietmutter)	1 Stück
	8030 413 051	Seitenblechdrehpunkt verstärkte Ausführung (Linsenkopfschraube M6x25 ISO 7380, U-Scheibe und Einnietmutter)	1 Stück
4-7	8030 413 060	Rastbolzen "Niro" M12x1,25	1 Stück
5-7	8030 413 061	Rastbolzeninlett "Niro"	1 Stück
	8030 413 070	Kantenschutz 2 mm, schwarz,	1 Meter
	8030 413 125	Kunststoff-Führungsscheibe	1 Stück

# Kleiderschutz und Armlehne

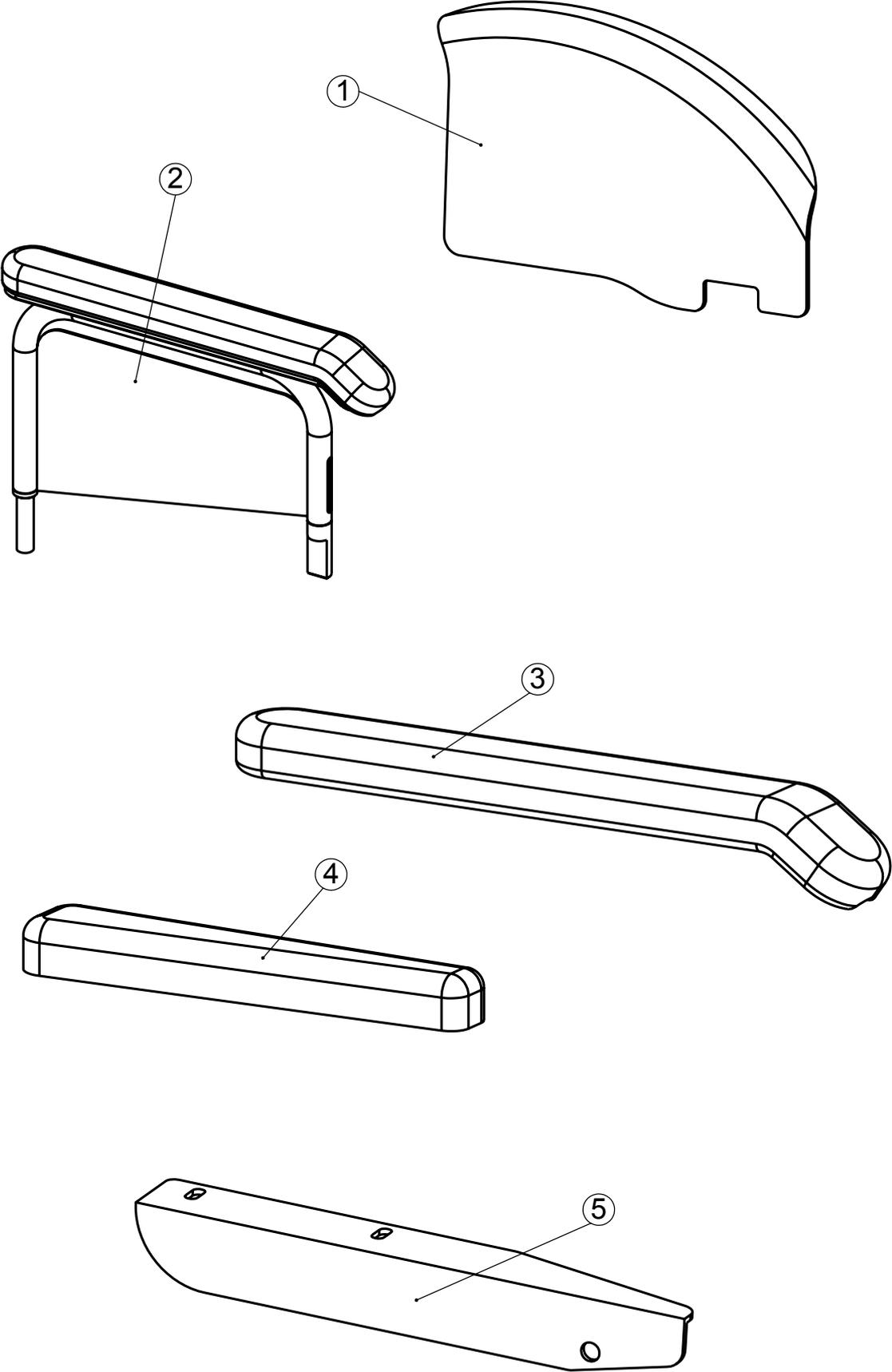

## Kleiderschutz und Armlehnen

### Kleiderschutz


Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 413 100	Kleiderschutz, fest montiert	1 Paar
	8030 413 110	Kleiderschutz steckbar	1 Paar
	8030 413 120	Kleiderschutz Übergröße, Radabdeckung Standard	1 Paar
1	8030 413 130	Kleiderschutz steckbar, Radabdeckung breit	1 Paar
	8030 413 135	Höhenanschlag für Kleiderschutz	1 Stück

### Armlehnen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 413 140	Armauflagen abklappbar, mit Armpolstern 25cm und Halterung	1 Paar
5	8030 413 141	Halteschiene für Armpolster für abklappbare Armauflage mit Seitenblechdrehpunkt	1 Stück
	8030 413 150	Armpolster 25cm auf steckbarem Kleiderschutz montiert	1 Paar
2	8030 413 160	DESK Seitenteile mit Armpolster 38cm mit Einsteckteilen, ohne Rahmenhalterung	1 Paar
4	8030 413 205	Armpolster, Länge 25cm	1 Stück
3	8030 413 210	Armpolster, Länge 38cm	1 Stück

jeweils mit Befestigungsmaterial

# Fußbügel durchgehend, faltbar, abnehmbar

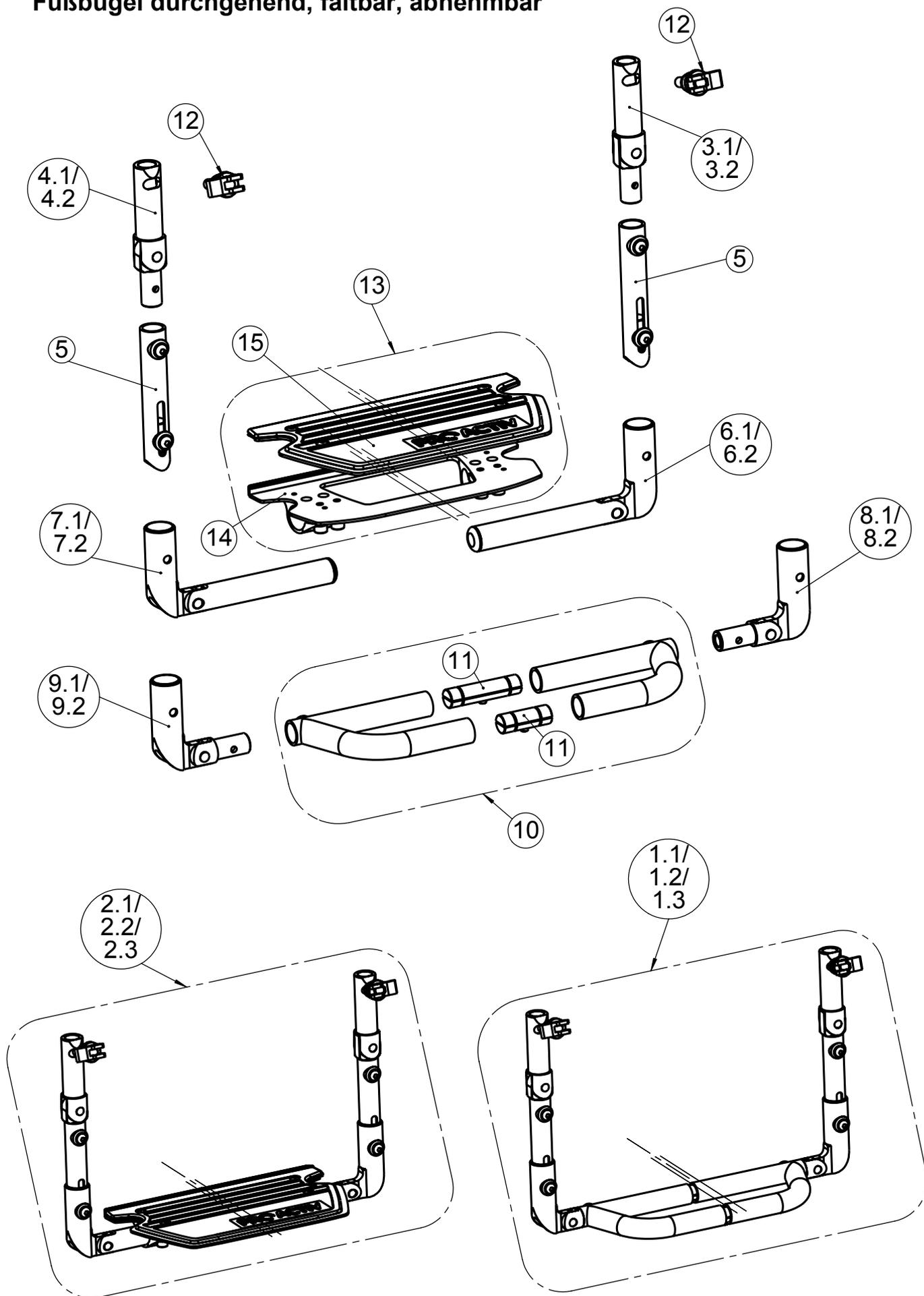


## Fußbügel durchgehend, faltbar, abnehmbar

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
		<b>Komplette Fußbügel</b>	
1.1	8030 611 000	Fußbügel mit Rohraufkl.bügel abnehmbar, faltbar für Rahmenvorbau "Gerade-Form"	1 Stück
2.1	8030 611 001	Fußbügel mit gummierter Auflage, abnehmbar, faltbar, für Rahmenvorbau "Gerade-Form"	1 Stück
1.2	8030 611 104	Fußbügel mit Rohraufkl.bügel abn., faltbar, für Rahmenvorbau "V-Form",	1 Stück
2.2	8030 611 100	Fußbügel mit gummierter Auflage abnehmbar, faltbar, für Rahmenvorbau "V-Form",	1 Stück
1.3	8030 611 105	Fußbügel m. Rohraufkl.bügel abnehmbar, faltbar für Rahmenvorbau "V-Form" 7° ausgestellt	1 Stück
2.3	8030 611 101	Fußbügel mit gummierter Auflage abnehmbar, faltbar, für Rahmenvorbau "V-Form" 7° ausgestellt	1 Stück
		<b>Einzelteile Fußbügel</b>	
3.1	8030 611 210	Rahmeneinsteckgelenk, rechts	1 Stück
4.1	8030 611 211	Rahmeneinsteckgelenk, links	1 Stück
3.2	8030 611 300	Rahmeneinsteckgelenk, 7° ausgestellt, rechts	1 Stück
4.2	8030 611 301	Rahmeneinsteckgelenk, 7° ausgestellt, links	1 Stück
5	8030 611 500	USL-Distanzrohr	1 Paar
6.1	8030 611 600	Fußauflagegelenk G-Form 90° rechts mit Fußauflagehalterohr	1 Stück
7.1	8030 611 601	Fußauflagegelenk G-Form 90° links mit Fußauflagehalterohr	1 Stück
8.1	8030 611 610	Fußauflagegelenk G-Form 90° rechts für Fußauflagebügel mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
9.1	8030 611 611	Fußauflagegelenk G-Form 90° links für Fußauflagebügel mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
6.2	8030 611 700	Fußauflagegelenk V-Form 97° rechts mit Fußauflagehalterohr	1 Stück
7.2	8030 611 701	Fußauflagegelenk V-Form 97° links mit Fußauflagehalterohr	1 Stück
8.2	8030 611 710	Fußauflagegelenk V-Form 97° rechts für Fußauflagebügel mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
9.2	8030 611 711	Fußauflagegelenk V-Form 97° links für Fußauflagebügel mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
10	8030 611 800	Fußauflagebügel mit Fußbügelverbinder	1 Stück
11	8030 611 850	Fußbügelverbinder l = 42mm oder l = 62mm	1 Paar
		<b>Rastbolzen</b>	
12	8030 611 400	Rastbolzen (Länge 16,5mm) mit Einschraubmutter M16 und Betätigungsgebel	1 Stück
		<b>Fußbrettauflage</b>	
13	8030 611 900	Durchgehende Fußbrettauflage gummiert mit Klemmung für stufenlose Winkelverstellung 145mm tief, XXXmm breit	1 Stück
14	8030 611 901	Fußauflagehalteplatte XXXmm breit	1 Stück
15	8030 611 902	Fußbrettauflage gummiert XXXmm breit 130mm tief	1 Stück

Fußbrettauflagen sind in den Breiten 170, 200, 230, 260, 310, 360mm erhältlich!

**Fußbügel durchgehend, einseitig hochklappbar,  
nach außen schwenkbar, abnehmbar**

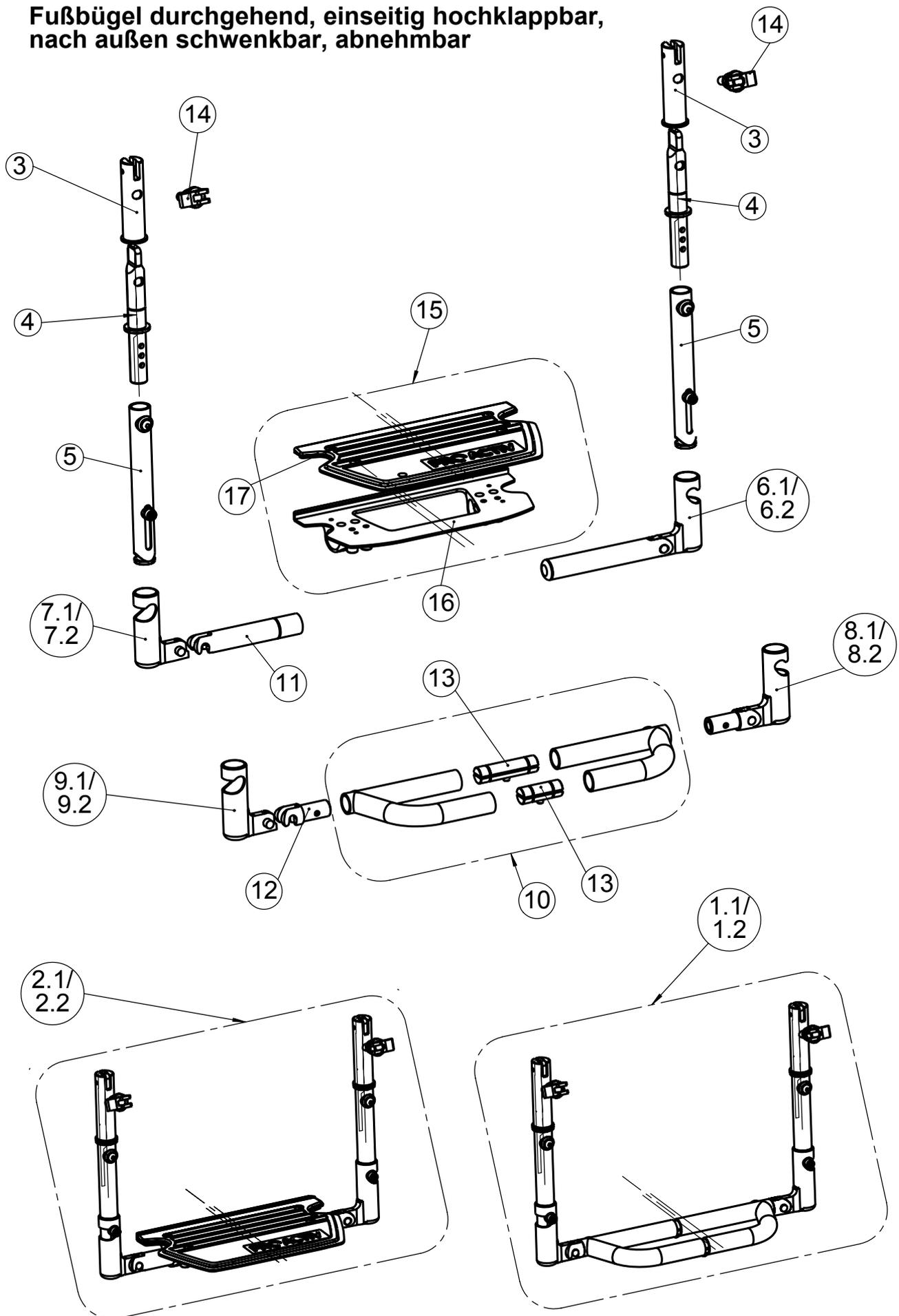


**Fußbügel durchgehend, einseitig hochklappbar,  
nach außen schwenkbar, abnehmbar**

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
		<b>Komplette Fußbügel</b>	
1.1	8030 612 010	Fußbügel m. Rohraufkl.bügel, eins.hochklappbar G-Form	1 Stück
2.1	8030 612 000	Fußbügel mit gummierter Auflage, eins. hochklappbar G-Form	1 Stück
1.2	8030 612 110	Fußbügel m. Rohraufkl.bügel, eins.hochklappbar V-Form	1 Stück
2.2	8030 612 100	Fußbügel mit gummierter Auflage, eins. hochklappbar V-Form	1 Stück
		<b>Einzelteile Fußbügel</b>	
3	8030 612 200	Rahmeneinschubhülse	1 Stück
4	8030 612 300	Rahmeneinschubzapfen	1 Stück
5	8030 612 500	USL-Distanzrohr	1 Paar
6.1	8030 612 600	Fußauflagegelenk G-Form 90° rechts schwenkbar, mit Halterohr für gummierte Auflage winkelverstellbar	1 Stück
7.1	8030 612 601	Fußauflagegelenk G-Form 90° links m. Gabel am Halterohr schwenkbar, für gummierte Auflage winkelverstellbar	1 Stück
8.1	8030 612 610	Fußauflagegelenk G-Form 90° rechts schwenkbar, für Rohraufklagebügel, mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
9.1	8030 612 611	Fußauflagegelenk G-Form 90° links m. Gabel (Aufnahme ø16) schwenkbar, für Rohraufklagebügel	1 Stück
6.2	8030 612 700	Fußauflagegelenk V-Form 7° rechts schwenkbar, mit Halterohr, für gummierte Auflage winkelverstellbar	1 Stück
7.2	8030 612 701	Fußauflagegelenk V-Form 7° links m. Gabel am Halterohr,schwenkbar, für gummierte Auflage winkelverstellbar	1 Stück
8.2	8030 612 710	Fußauflagegelenk V-Form 7° rechts schwenkbar, für Rohraufklagebügel, mit Aufnahmezapfen ø16	1 Stück
9.2	8030 612 711	Fußauflagegelenk V-Form 7° links m. Gabel (Aufnahme ø16) schwenkbar, für Rohraufklagebügel	1 Stück
10	8030 612 800	Fußauflagebügel	1 Stück
11	8030 612 821	Fußauflagehalterohr mit Haken für gummierte Auflage winkelverstellbar	1 Stück
12	8030 612 820	Auflagehaken für Rohraufklagebügel	1 Stück
13	8030 612 850	Fußbügelverbinder l = 42mm oder l = 62mm	1 Paar
		<b>Rastbolzen</b>	
14	8030 612 400	Rastbolzen Länge 19,5mm mit Einschraub- mutter M16 und Betätigungshebel	1 Stück
		<b>Fußbrettauflage</b>	
15	8030 612 900	Durchgehende Fußbrettauflage gummiert mit Klemmung für stufenlose Winkelverstellung 145mm tief, XXXmm breit	1 Stück
16	8030 612 901	Fußauflagehalteplatte XXXmm breit	1 Stück
17	8030 612 902	Fußbrettauflage gummiert XXXmm breit 130mm tief	1 Stück

Fußbrettauflagen sind in den Breiten 170, 200, 230, 260, 310,  
360mm erhältlich!

# Fußstütze geteilt, seitlich hochklappbar, schwenkbar, abnehmbar

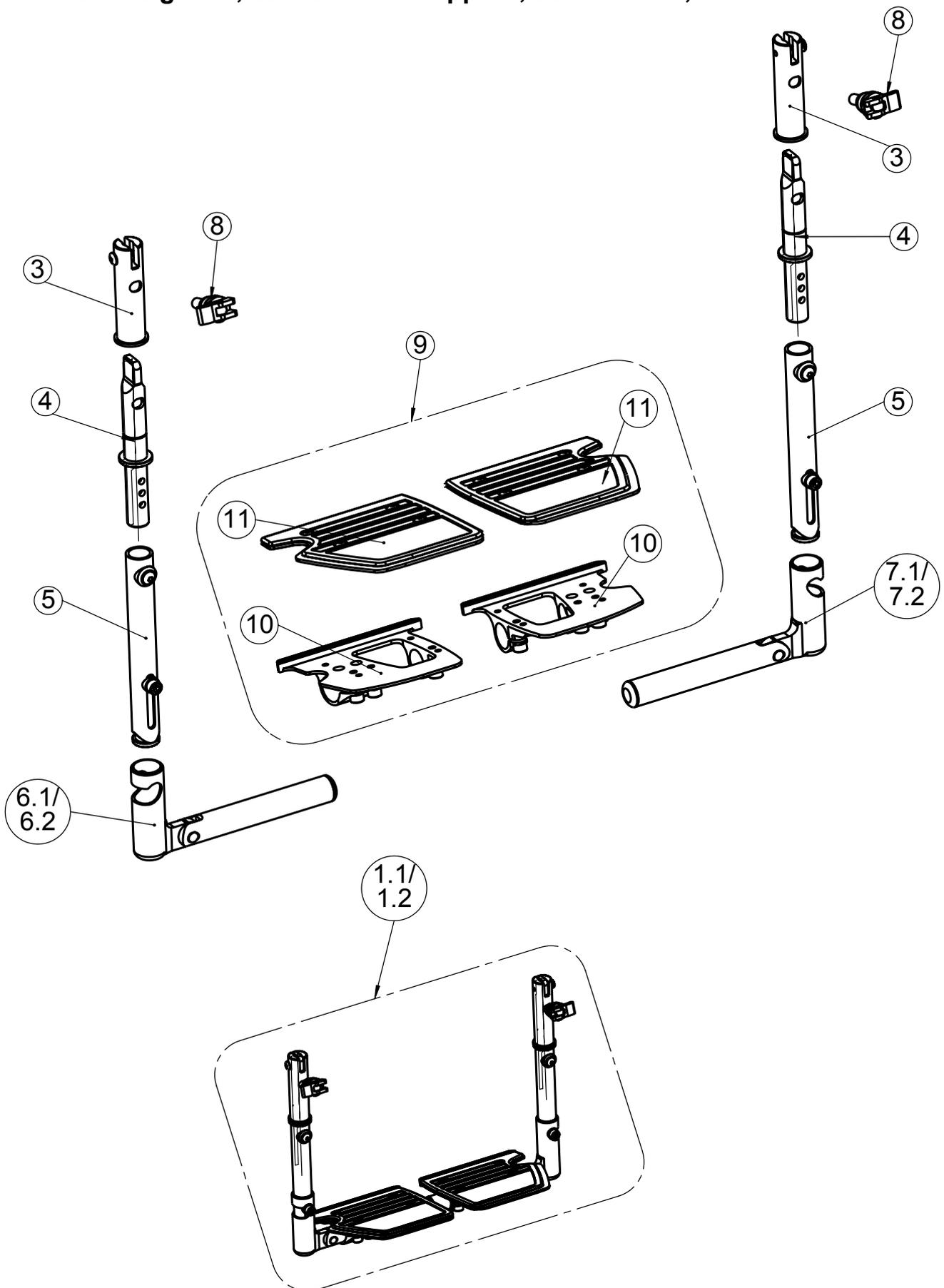


## Fußstütze geteilt, seitlich hochklappbar, schwenkbar, abnehmbar

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
		<b>Komplette Fußbügel</b>	
1.1	8030 615 000	Geteilter Fußbügel, abnehmbar, G-Form	1 Stück
1.2	8030 615 100	Geteilter Fußbügel, abnehmbar, V-Form	1 Stück
		<b>Einzelteile Fußbügel</b>	
3	8030 615 200	Rahmeneinschubhülse	1 Stück
4	8030 615 300	Rahmeneinschubzapfen	1 Stück
5	8030 615 500	USL-Distanzrohr	1 Paar
6.1	8030 615 003	Fußauflagegelenk G-Form links, schwenkbar, mit Befestigungsinlett und Feder	1 Stück
7.1	8030 615 002	Fußauflagegelenk G-Form rechts, schwenkbar, mit Befestigungsinlett und Feder	1 Stück
6.2	8030 615 005	Fußauflagegelenk V-Form links, schwenkbar, mit Befestigungsinlett und Feder	1 Stück
7.2	8030 615 004	Fußauflagegelenk V-Form rechts, schwenkbar, mit Befestigungsinlett und Feder	1 Stück
		<b>Rastbolzen</b>	
8	8030 615 400	Rastbolzen Länge 19,5mm mit Einschraub- mutter M16 und Betätigungshebel	1 Stück
		<b>Fußbrettauflage</b>	
9	8030 615 900	Geteilte Fußbrettauflage gummiert, mit Klemmung für stufenlose Winkelverstellung, 130mm tief, Breite Auflagehälfte XXXmm	1 Paar
10	8030 615 901	Fußauflagehalteplatte gummiert geteilt, Auflagehälfte XXXmm breit	1 Paar
11	8030 615 902	Fußbrettauflage geteilt. Auflagehälfte XXXmm breit 130mm tief	1 Paar

Fußbrettauflagehälften sind in den Breiten 125, 150, 175mm erhältlich!

# Fußstütze "Swing Away", nach außen schwenkbar, abnehmbar

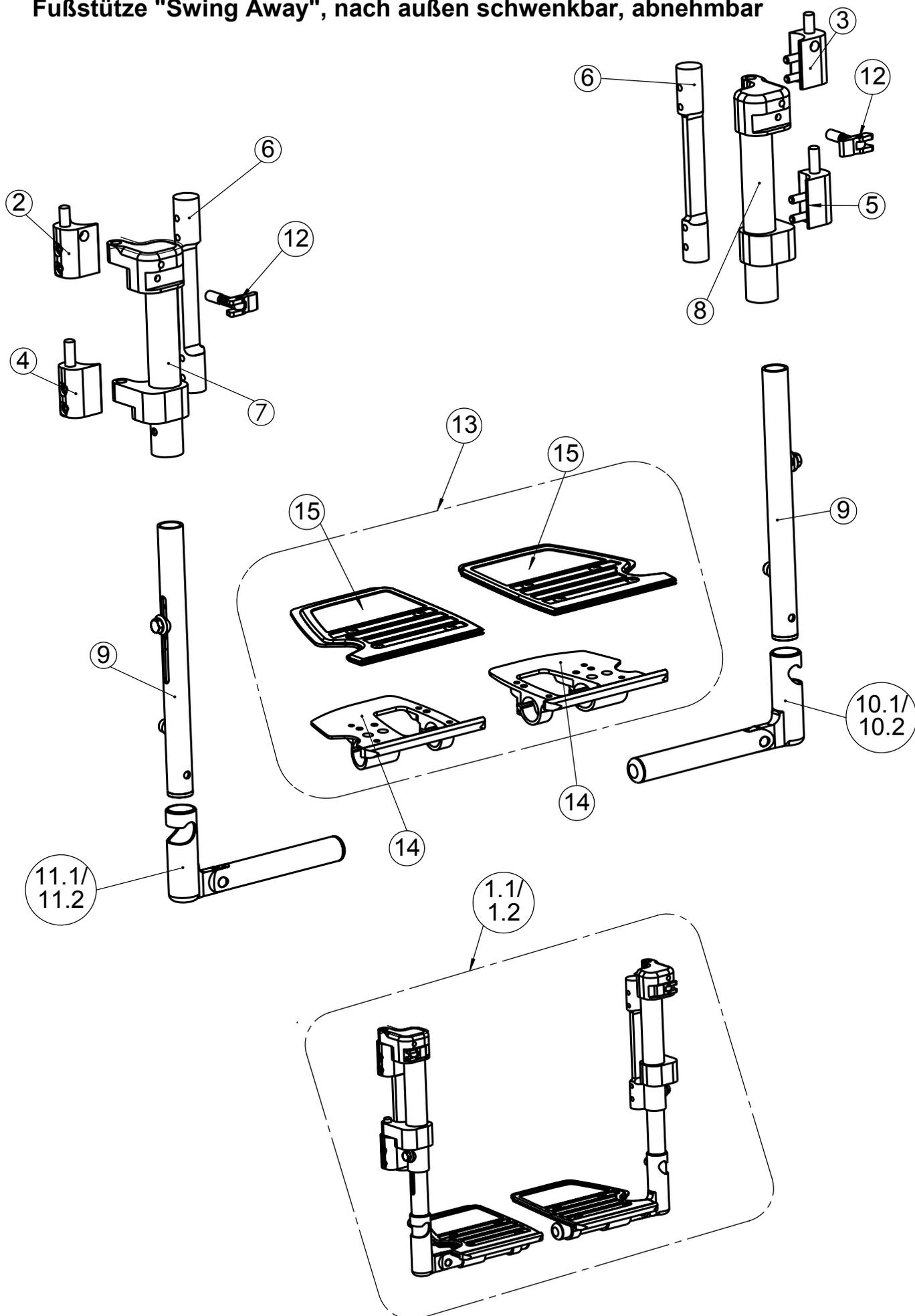

## Fußstütze "Swing Away", nach außen schwenkbar, abnehmbar

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
		<b>Komplette Fußbügel</b>	
1.1	8030 617 000	Fußbügel "Swing away", abnehmbar, nach außen schwenkbar G-Form	1 Paar
1.2	8030 617 100	Fußbügel "Swing away", abnehmbar, nach außen schwenkbar, V-Form	1 Paar
		<b>Einzelteile Fußbügel</b>	
2	8030 617 200	Rahmenhalterung oben, rechts	1 Stück
3	8030 617 201	Rahmenhalterung oben, links	1 Stück
4	8030 617 210	Rahmenhalterung unten, rechts	1 Stück
5	8030 617 211	Rahmenhalterung unten, links	1 Stück
6	8030 617 212	Schraubinlett für Rahmenhalterung	1 Stück
7	8030 617 510	Aufnahmerohr rechts	1 Stück
8	8030 617 511	Aufnahmerohr links	1 Stück
9	8030 617 520	USL-Distanzrohr höhenverstellbar 220/270/320/370mm lang	1 Stück
10.1	8030 617 601	Fußauflagegelenk G-Form links, mit Halterohr, schwenkbar	1 Stück
11.1	8030 617 600	Fußauflagegelenk G-Form rechts, mit Halterohr, schwenkbar	1 Stück
10.2	8030 617 701	Fußauflagegelenk V-Form links, mit Halterohr, schwenkbar	1 Stück
11.2	8030 617 700	Fußauflagegelenk V-Form rechts, mit Halterohr, schwenkbar	1 Stück
		<b>Rastbolzen</b>	
12	8030 617 400	Rastbolzen mit Augenschraube, Feder und Betätigungshebel XXmm	1 Stück
		<b>Fußbrettauflage</b>	
13	8030 617 900	Geteilte Fußbrettauflage gummiert, mit Klemmung für stufenlose Winkelverstellung, 130mm tief, Breite Auflagehälfte XXXmm	1 Paar
14	8030 617 901	Fußauflagehalteplatte gummiert geteilt, Auflagehälfte XXXmm breit	1 Paar
15	8030 617 902	Fußbrettauflage geteilt. Auflagehälfte XXXmm breit 130mm tief	1 Paar

Fußbrettauflagehälften sind in den Breiten 125, 150, 175mm erhältlich!




## Zubehör Fußbügel

### Wadenband

<b>Pos.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>
	8030 810 170	Wadenband schwarz, Länge 70cm	1 Stück
	8030 810 180	Wadenband schwarz, Länge 80cm	1 Stück
	8030 810 190	Wadenband schwarz, Länge 90cm	1 Stück

# Kippstützen

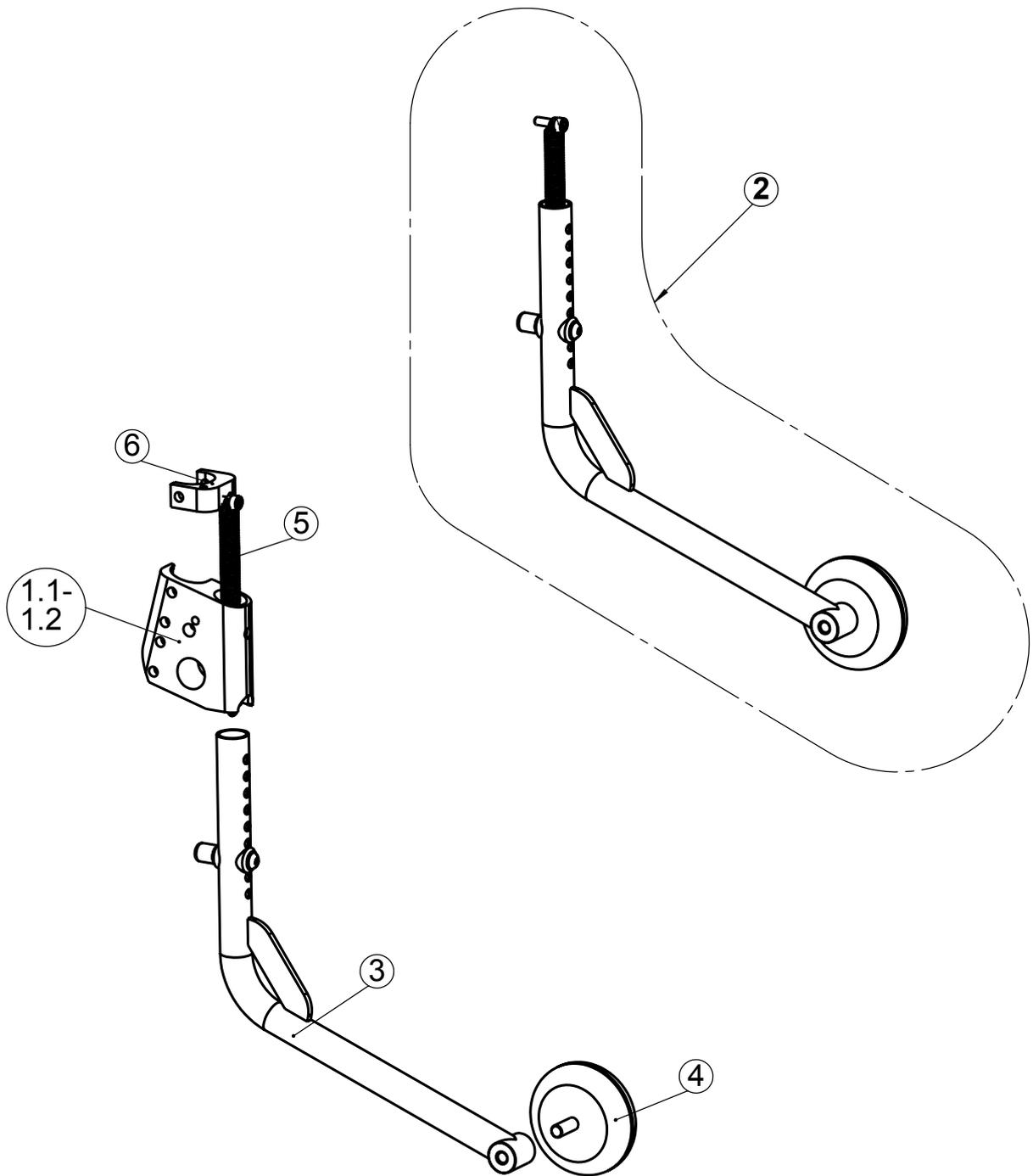

## Kippstützen, Transitrollen

### Adapter

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8030 310 100	Universaladapter rechts	1 Stück
1.2	8030 310 101	Universaladapter links	1 Stück


### Kippstützen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
2	8030 310 301	Kippstützenbügel (L200/244), mit Rad, und Haltefeder	1 Stück
3	8030 310 201	Kippstützenbügel Stahl, (L200/244),	1 Stück
4	8030 310 600	Kippstützenrad Ø 72mm	1 Stück
5+6	8030 310 105	Feder mit Federhalter	1 Stück
5	8030 310 106	Feder	1 Stück
	8030 310 200	Ankippbügel	1 Stück

### Transitrollen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8030 310 500	Transitrollen mit Rad und Quick-Pin	1 Stück
	8030 310 125	Quick-Pin Ø 6,3	1 Stück

# Lenkradbefestigung Lenkräder

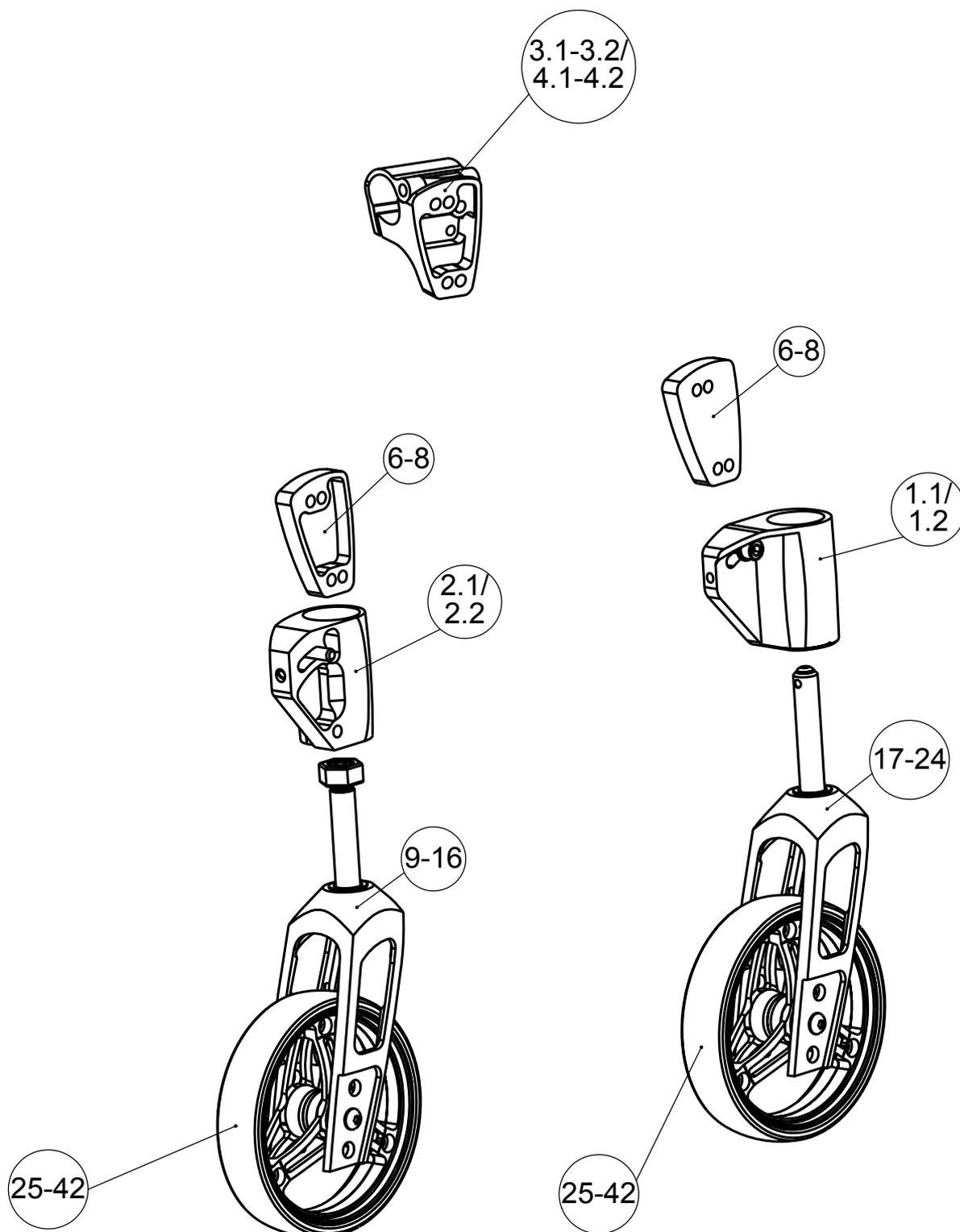

## Lenkrad-Lagerblock

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8000 510 500	Lagerblock Design rechts, silber eloxiert, mit Lager, Abdeckkappe und Befestigungsschrauben	1 Stück
2.1	8000 510 501	Lagerblock Design links, silber eloxiert, mit Lager, Abdeckkappe und Befestigungsschrauben	1 Stück
1.2	8000 510 510	Lagerblock Design rechts, schwarz eloxiert, mit Lager, Abdeckkappe und Befestigungsschrauben	1 Stück
2.2	8000 510 511	Lagerblock Design links, schwarz eloxiert, mit Lager, Abdeckkappe und Befestigungsschrauben	1 Stück
3.1	8000 510 504	Lenkradklemmblock rechts Design silber	1 Stück
4.1	8000 510 505	Lenkradklemmblock links Design silber	1 Stück
3.2	8000 510 506	Lenkradklemmblock rechts Design schwarz	1 Stück
4.2	8000 510 507	Lenkradklemmblock links Design schwarz	1 Stück
5	8000 510 550	Lager 6001 2 RS 1 (für Lenkrad-Lagerblock Ø 12mm)	1 Stück
6.1	8000 510 001	Lenkradspurdistanz Design 10mm, silber eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar
7.1	8000 510 003	Lenkradspurdistanz Design 15mm, silber eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar
8.1	8000 510 005	Lenkradspurdistanz Design 20mm, silber eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar
6.2	8000 510 011	Lenkradspurdistanz Design 10mm, schwarz eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar
7.2	8000 510 013	Lenkradspurdistanz Design 15mm, schwarz eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar
8.2	8000 510 015	Lenkradspurdistanz Design 20mm, schwarz eloxiert, mit Befestigungsschrauben	1 Paar

## Lenkradgabel mit Schraubachse

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
9.1	8000 510 160	Lenkradgabel Design, 1-Schlitz mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
9.2	8000 510 161	Lenkradgabel Design, 1-Schlitz mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
10.1	8000 510 260	Lenkradgabel Design, 2-Schlitz mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
10.2	8000 510 261	Lenkradgabel Design, 2-Schlitz mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
11.1	8000 510 360	Lenkradgabel Design, 3-Schlitz mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
11.2	8000 510 361	Lenkradgabel Design, 3-Schlitz mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
12.1	8000 510 100	Lenkradgabel Größe 1 "Heavy Duty" mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
12.2	8000 510 101	Lenkradgabel Größe 1 "Heavy Duty" mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
13.1	8000 510 200	Lenkradgabel Größe 2 "Heavy Duty" mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
13.2	8000 510 201	Lenkradgabel Größe 2 "Heavy Duty" mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
14.1	8000 510 300	Lenkradgabel Größe 3 "Heavy Duty" mit Schraubachse, silber eloxiert	1 Stück
14.2	8000 510 301	Lenkradgabel Größe 3 "Heavy Duty" mit Schraubachse, schwarz eloxiert	1 Stück
15	8000 502 310	Lenkraddrehgabel mit Schraubachse Gabelweite 42mm	1 Stück
16	8000 502 312	Lenkraddrehgabel mit Schraubachse, Gabelweite 60mm (für Lenkrad 7x1 3/4")	1 Stück

## Lenkradgabel mit Steckachse

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
17.1	8000 510 150	Lenkradgabel Design, 1-Schlitz mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
17.2	8000 510 151	Lenkradgabel Design, 1-Schlitz mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
18.1	8000 510 250	Lenkradgabel Design, 2-Schlitz mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
18.2	8000 510 251	Lenkradgabel Design, 2-Schlitz mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
19.1	8000 510 350	Lenkradgabel Design, 3-Schlitz mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
19.2	8000 510 351	Lenkradgabel Design, 3-Schlitz mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
20.1	8000 510 110	Lenkradgabel Größe 1 "Heavy Duty" mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
20.2	8000 510 111	Lenkradgabel Größe 1 "Heavy Duty" mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
21.1	8000 510 210	Lenkradgabel Größe 2 "Heavy Duty" mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
21.2	8000 510 211	Lenkradgabel Größe 2 "Heavy Duty" mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
22.1	8000 510 310	Lenkradgabel Größe 3 "Heavy Duty" mit Steckachse, silber eloxiert	1 Stück
22.2	8000 510 311	Lenkradgabel Größe 3 "Heavy Duty" mit Steckachse, schwarz eloxiert	1 Stück
23	8000 502 302	Lenkraddrehgabel mit Steckachse, 42mm	1 Stück
24	8000 502 300	Lenkraddrehgabel mit Steckachse, 60mm	1 Stück





## Lenkräder

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
25	8000 501 140	80mm Skaterollen*	1 Stück
26	8000 501 150	100mm Skaterollen*	1 Stück
27	8000 501 160	100mm Sicherheits-Leuchtrolle*	1 Stück
28	8000 501 000	4" Standard-Lenkrad (100/30), 82A*	1 Stück
29	8000 501 020	5" Standard-Lenkrad (125/30), 82A*	1 Stück
30	8000 501 050	6" Standard-Lenkrad (150/30), 82 A*	1 Stück
31	8000 501 202	5"-Leichtlauf-Lenkrad mit 3 Speichen Alu-Felge*	1 Stück
32	8000 501 201	5" Gummi-Laufring für Leichtlauf-Lenkrad	1 Stück
33	8000 501 212	5"-Comfort-Lenkrad mit 3 Speichen Alu-Felge*	1 Stück
34	8000 501 211	5" Gummi-Laufring für Comfort-Lenkrad für Alu-	1 Stück
35	8000 501 030	5" Lenkrad 2-Komponenten*	1 Stück
36	8000 501 060	6" Elastic-Lenkrad (150/32), Lauffläche 32mm*	1 Stück
37	8000 501 070	6x 1 1/4" Lenkrad luftbereift	1 Stück
38	8000 501 080	6 x 1.1/4" Flexel-Lenkrad*	1 Stück
39	8000 501 110	7x1.3/4" Lenkrad , luftbereift (für Gabelweite 60mm)*	1 Stück
40	8000 501 120	7x1.3/4" Flexel-Lenkrad (für Gabelweite 60mm)*	1 Stück
41	8000 500 530	Lager 608 2RS 1 für Lenkräder 4" / 5" / Skaterolle	1 Stück
42	8000 500 520	Lager 6000 2RS 1 für Lenkräder 6" / 7"	1 Stück

\*pannensicher  
Lieferung jeweils mit Achse

# Federgabel

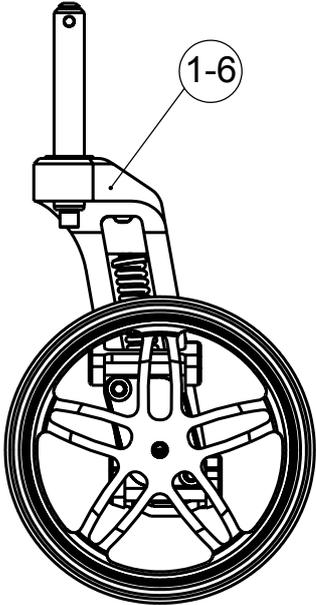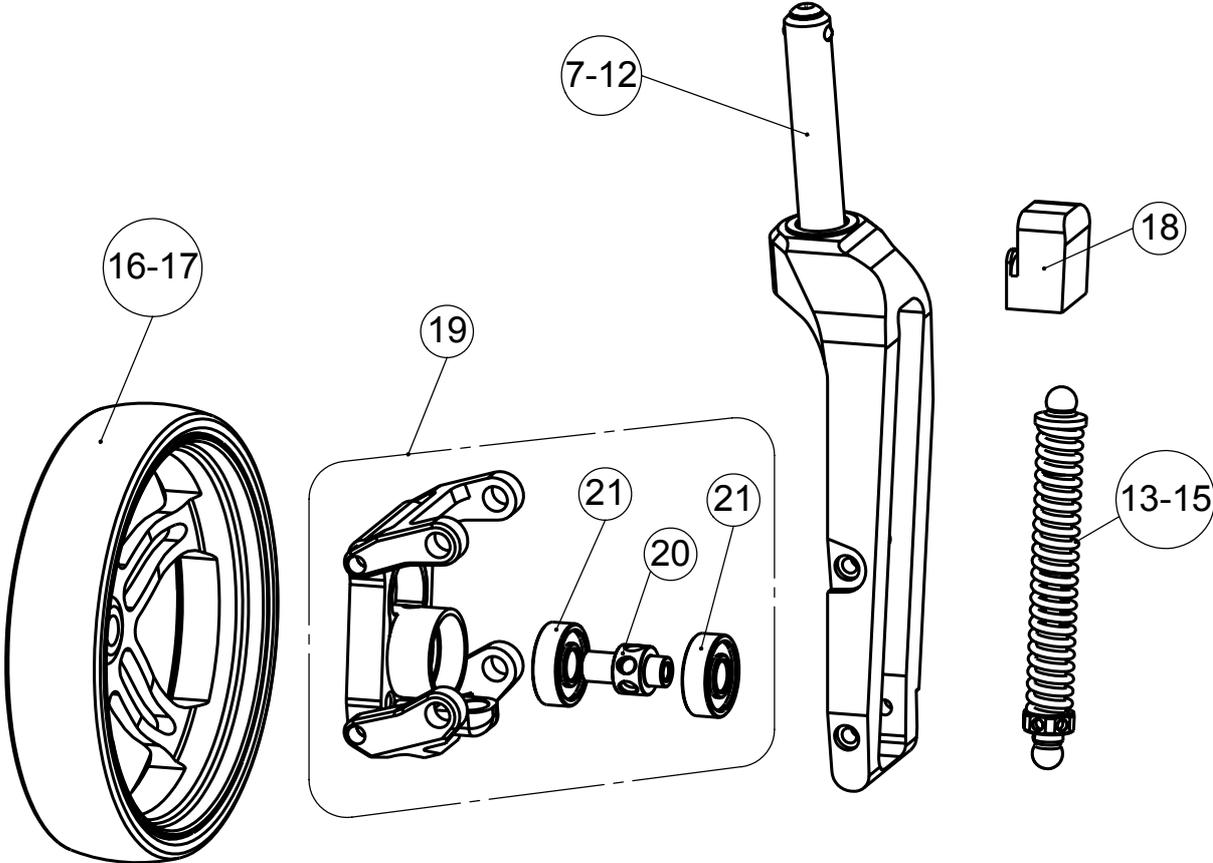

## Federgabel komplett

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8000 500 100-01	Federgabel Gr. 1 mit 5" Alu Rad und Schraubachse rechts	1 Stück
2.1	8000 500 100-02	Federgabel Gr. 2 mit 5" Alu Rad und Schraubachse rechts	1 Stück
3.1	8000 500 100-03	Federgabel Gr. 3 mit 5" Alu Rad und Schraubachse rechts	1 Stück
1.2	8000 500 101-01	Federgabel Gr. 1 mit 5" Alu Rad und Schraubachse links	1 Stück
2.2	8000 500 101-02	Federgabel Gr. 2 mit 5" Alu Rad und Schraubachse links	1 Stück
3.2	8000 500 101-03	Federgabel Gr. 3 mit 5" Alu Rad und Schraubachse links	1 Stück
4.1	8000 500 110-01	Federgabel Gr. 1 mit 5" Alu Rad und Steckachse rechts	1 Stück
5.1	8000 500 110-02	Federgabel Gr. 2 mit 5" Alu Rad und Steckachse rechts	1 Stück
6.1	8000 500 110-03	Federgabel Gr. 3 mit 5" Alu Rad und Steckachse rechts	1 Stück
4.2	8000 500 111-01	Federgabel Gr. 1 mit 5" Alu Rad und Steckachse links	1 Stück
5.2	8000 500 111-02	Federgabel Gr. 2 mit 5" Alu Rad und Steckachse links	1 Stück
6.2	8000 500 111-03	Federgabel Gr. 3 mit 5" Alu Rad und Steckachse links	1 Stück







## Federgabel

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8000 500 150	Federgabel Gr. 1 rechts mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
2.1	8000 500 151	Federgabel Gr. 1 links mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
1.2	8000 500 160	Federgabel Gr. 1 rechts mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
2.2	8000 500 161	Federgabel Gr. 1 links mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
3.1	8000 500 152	Federgabel Gr. 2 rechts mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
4.1	8000 500 153	Federgabel Gr. 2 links mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
3.2	8000 500 162	Federgabel Gr. 2 rechts mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
4.2	8000 500 163	Federgabel Gr. 2 links mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
5.1	8000 500 154	Federgabel Gr. 3 rechts mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
6.1	8000 500 155	Federgabel Gr. 3 links mit Schraubachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
5.2	8000 500 168	Federgabel Gr. 3 rechts mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
6.2	8000 500 169	Federgabel Gr. 3 links mit Steckachse, ohne Alu-Felge	1 Stück
7.1	8000 500 901-001	Lenkgabelholm Gr. 1, m. Schraubachse, rechts	1 Stück
8.1	8000 500 901-002	Lenkgabelholm Gr. 1, m. Schraubachse, links	1 Stück
7.2	8000 500 902-001	Lenkgabelholm Gr. 1, m. Steckachse, rechts	1 Stück
8.2	8000 500 902-002	Lenkgabelholm Gr. 1, m. Steckachse, links	1 Stück
9.1	8000 500 903-001	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Schraubachse, rechts	1 Stück
10.1	8000 500 903-002	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Schraubachse, links	1 Stück
9.2	8000 500 904-001	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Steckachse, rechts	1 Stück
10.2	8000 500 904-002	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Steckachse, links	1 Stück
11.1	8000 500 905-001	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Schraubachse, rechts	1 Stück
12.1	8000 500 905-002	Lenkgabelholm Gr. 2, m. Schraubachse, links	1 Stück
11.2	8000 500 906-001	Lenkgabelholm Gr. 3, m. Steckachse, rechts	1 Stück
12.2	8000 500 906-002	Lenkgabelholm Gr. 3, m. Steckachse, links	1 Stück

## Federgabel

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
13.1	8000 500 165	Federelement harte Ausf., Federgabel Gr.1 (H140mm), Farbe: anthrazit, Federkraft 3-36kg	1 Stück
14.1	8000 500 166	Federelement harte Ausf., Federgabel Gr.2 (H170mm), Farbe: anthrazit, Federkraft 3-36kg	1 Stück
15.1	8000 500 167	Federelement harte Ausf., Federgabel Gr.3 (H200mm), Farbe: anthrazit, Federkraft 3-36kg	1 Stück
13.2	8000 500 170	Federelement weiche Ausf., Federgabel Gr.1 (H140mm), Farbe: weiß-Alu, Federkraft 2-23kg	1 Stück
14.2	8000 500 171	Federelement weiche Ausf., Federgabel Gr.2 (H170mm), Farbe: weiß-Alu, Federkraft 2-23kg	1 Stück
15.2	8000 500 172	Federelement weiche Ausf., Federgabel Gr.3 (H200mm), Farbe: weiß-Alu, Federkraft 2-23kg	1 Stück
16	8000 500 900	Comfort- Lenkradfelge 5" (125mm) Alu, für gefederte Lenkradgabel	1 Stück
17	8000 500 920	Leichtlauf- Lenkradfelge 5" (125mm) Alu, für gefederte Lenkradgabel	1 Stück
18.1	8000 500 907	Kugelpfanne oben rechts f. Aufnahme Federelement	1 Stück
18.2	8000 500 908	Kugelpfanne oben links f. Aufnahme Federelement	1 Stück
19.1	8000 500 917	Achsschenkel rechts komplett mit Querlenker oben und unten, Lagerkassette mit Kugellager und Radachse	1 Stück
19.2	8000 500 918	Achsschenkel links komplett mit Querlenker oben und unten, Lagerkassette mit Kugellager und Radachse	1 Stück
20	8000 500 922	Radachse für Federgabel Alu	1 Stück
21	8000 500 530	Lager 608 2RS 1	1 Stück

# Antriebsradbefestigung

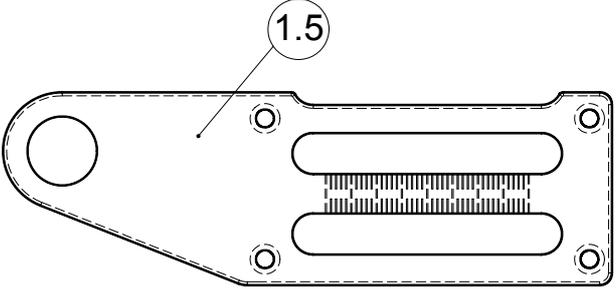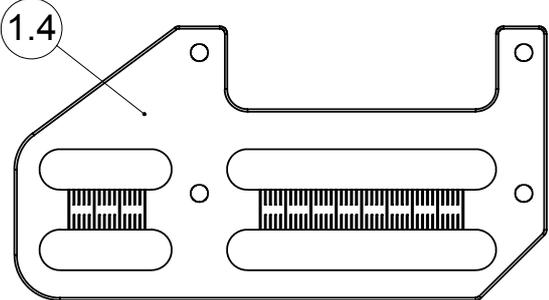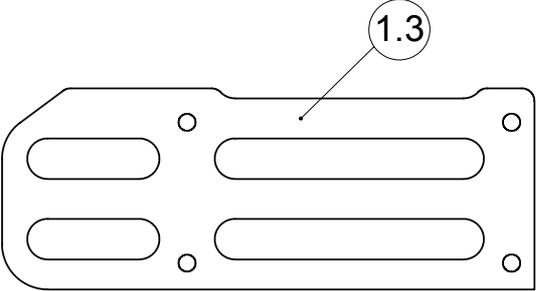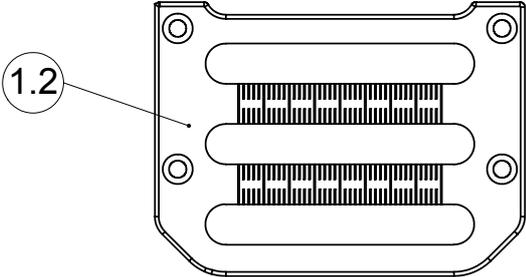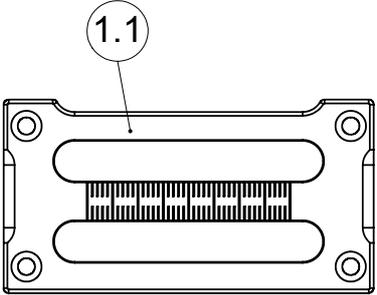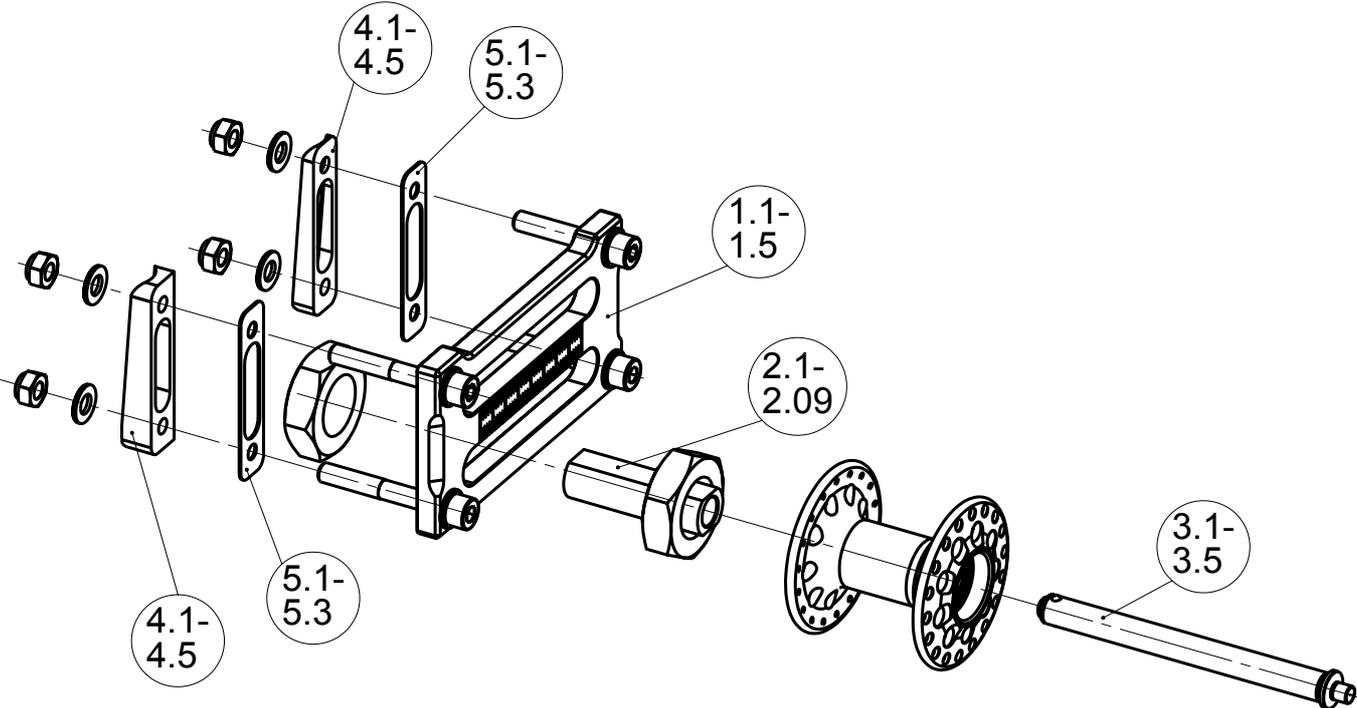

## Antriebsradbefestigung

### Antriebsradbefestigungsplatte

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8030 210 100	2-Schlitz Antriebsradplatte, silber eloxiert*	1 Stück
1.2	8030 210 110	3-Schlitz Antriebsradplatte, silber eloxiert*	1 Stück
1.3	8030 210 150	Verlängerte 2-Schlitz Antriebsradplatte, silber eloxiert*	1 Stück
1.4	8030 210 170	Verlängerte 3-Schlitz Antriebsradplatte, silber eloxiert*	1 Stück
1.5	8030 210 195	Verlängerte Bike Antriebsradplatte, incl. 4°-Sturz Antriebsradbuchse, silber eloxiert	1 Stück
	8030 210 197	Verlängerte Bike 3-Schlitz Antriebsradplatte, incl. 4° Sturz Antriebsradbuchse, silber eloxiert	1 Stück

\* ohne Antriebsradbuchse

### Antriebsradbuchse

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
2.1	8030 210 400	12mm Antriebsradbuchse M20x1,5; Länge 60mm (Standard) mit 2 Stück Präzisionsmutter M20x1,5 verzinkt (SW 30)	1 Stück
2.2	8030 210 402	12mm Antriebsradbuchse M20x1,5; Länge 52mm mit 2 Stück Präzisionsmutter M20x1,5 verzinkt (SW 30)	1 Stück
2.3	8030 210 420	1/2" Antriebsradbuchse M20x1,5; Länge 52mm mit 2 Stück Präzisionsmutter M20x1,5 verzinkt (SW30)	1 Stück
	8030 210 470	Präzisions-Mutter M20x1,5 (SW 30), verzinkt	1 Stück
2.4	8030 210 404	12mm Antriebsradbuchse M27x1,5; 1° Sturz integriert Länge 60mm (ohne Alu-Mutter 8030 210 480)	1 Stück
2.5	8030 210 405	12mm Antriebsradbuchse M27x1,5; 1° Sturz integriert Länge 52mm (ohne Alu-Mutter 8030 210 480)	1 Stück
2.6	8030 210 406	12mm Antriebsradbuchse M27x1,5; 4° Sturz integriert Länge 60mm (ohne Alu-Mutter 8030 210 480)	1 Stück
2.7	8030 210 407	12mm Antriebsradbuchse M27x1,5; 4° Sturz integriert Länge 52mm (ohne Alu-Mutter 8030 200 480)	1 Stück
2.8	8030 210 421	1/2" Antriebsradbuchse M27x1,5; 1° Sturz integriert Länge 52mm (ohne Alu-Mutter 8030 210 480)	1 Stück
2.9	8030 210 422	1/2" Antriebsradbuchse M27x1,5; 4° Sturz integriert Länge 52mm (ohne Alu-Mutter 8030 210 480)	1 Stück
	8030 210 430	Antriebsrad-Buchse M16 x 1; 1/2", für E-Fix/E-Motion, Länge 50,7mm	1 Stück
	8030 210 431	Antriebsrad-Buchse M16 x 1; 12mm, für Stopblock Nabe, Länge 50,7mm	1 Stück
	8030 210 480	Alu-Mutter M27x1,5 (SW 41), natur eloxiert	1 Stück
	8030 210 460	Gewinding M20x1,5 Außenø27mm	1 Stück

jeweils mit Befestigungsmuttern



### Antriebsrad-Steckachsen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3.1	8030 210 300	12mm Steckachse, 122mm Verriegelungslänge (Standard), Druckknopflänge 7mm	1 Stück
3.2	8030 210 310	12mm Steckachse, 122mm Verriegelungslänge, Druckknopflänge 15mm (für Tetra-Clip-Auslösung)	1 Stück
3.3	8030 210 305	12mm Steckachse, 110mm Verriegelungslänge, Druckknopflänge 7mm (für Einhandantrieb)	1 Stück
3.4	8030 210 320	1/2" Steckachse, Verriegelungslänge 122mm	1 Stück
3.5	8030 210 321	1/2" Steckachse, Verriegelungslänge 114mm	1 Stück
3.6	8030 217 300	Umrüstsatz Steckachse von 12mm auf 1/2" bestehend aus: 2x 1/2" Steckachse, Verriegelungslänge 114mm 2x 1/2" Buchse M20x1,5, Länge 52mm 4x Lager 1/2" x 28 x 7 2x Distanzring 28 x 8	1 Set

### Sturzadapter


Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
4.1	8030 210 200	1° Sturzadapter (VPE: 2St.)	1 Satz
4.2	8030 210 220	4° Sturzadapter (VPE: 4St.)	1 Satz
4.3	8030 210 230	6° Sturzadapterkeile (VPE: 4St.)	1 Satz
4.4	8030 210 240	10° Sturzadapter (VPE: 4St.)	1 Satz
4.5	8030 210 250	12° Sturzadapter (VPE: 4St.)	1 Satz

jeweils mit Befestigungsmaterial

### Spurdistanz

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
5.1	8030 210 270	Spurdistanz 0,8 mm	1 Stück
5.2	8030 210 280	Spurdistanz 1,4 mm	1 Stück
5.3	8030 210 290	Spurdistanz 2,0 mm	1 Stück

Antriebsräder

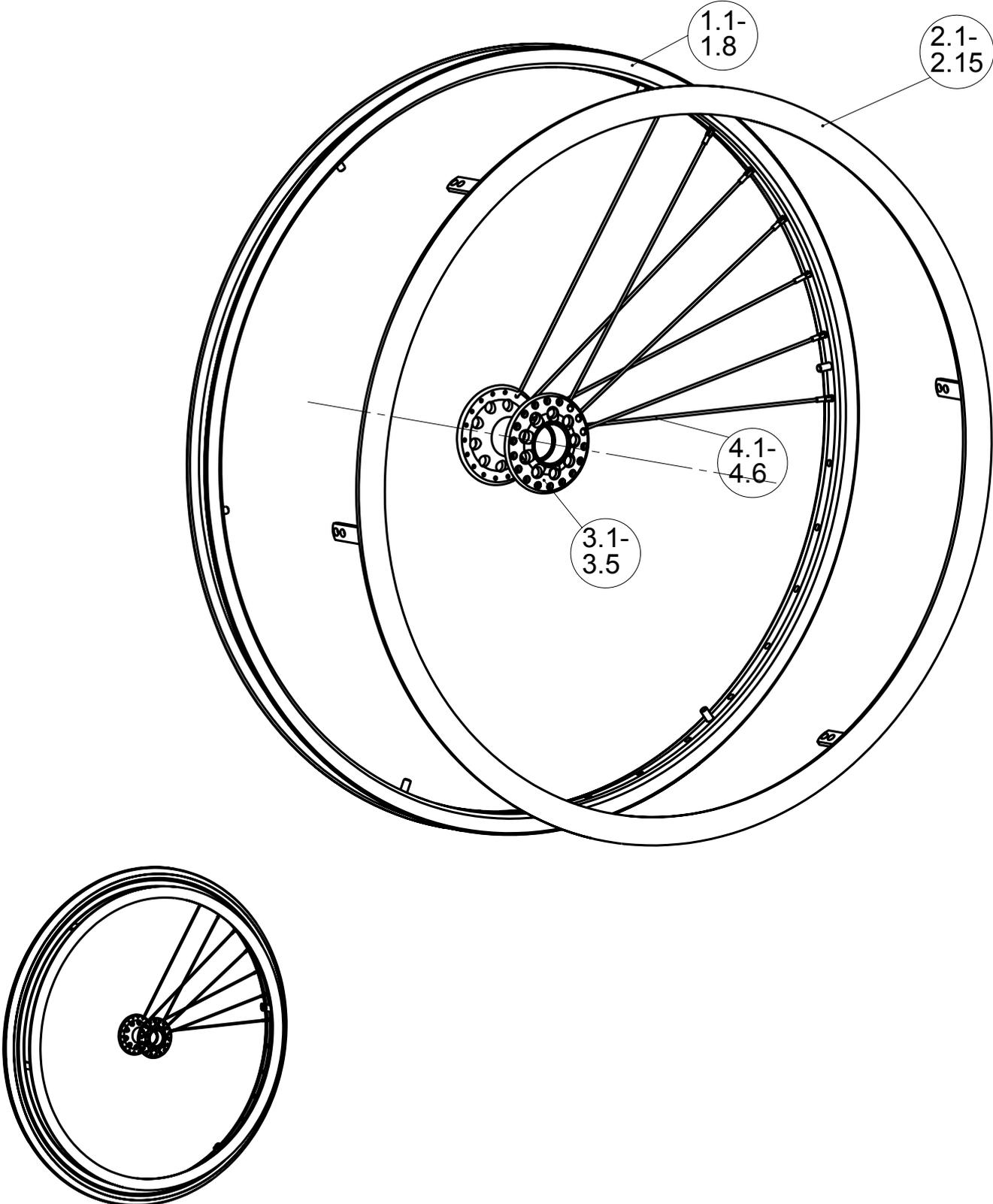

## Antriebsräder

### Eingespeichte Felgen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
1.1	8000 204 100	20" Antriebsrad mit Alu-Felge silber (451x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.2	8000 204 111	22" Antriebsrad mit Alu-Felge silber (489x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.3	8000 204 112	22" Antriebsrad, mit Alu-Felge silber (489x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 18 Speichen	1 Stück
1.4	8000 204 121	24" Antriebsrad mit Alu-Felge silber (540x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.5	8000 204 122	24" Antriebsrad, Alu-Felge silber (540x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 18 Speichen	1 Stück
1.6	8000 204 310	24" Antriebsrad mit Alu-Doppelwandfelge (540x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.7	8000 204 330	25" Antriebsrad mit Alu-Doppelwandfelge (559x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.8	8000 204 340	26" Antriebsrad mit Alu-Doppelwandfelge (590x19) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht 36 Speichen	1 Stück
1.9	8000 204 350	24" Antriebsrad mit Alu-Doppelwandfelge (507) und Hochflanschnabe silber, radial verspeicht, 36 Speichen, für MTB Bereifung	1 Stück

jeweils ohne Bereifung, ohne Greifring, ohne Steckachse

### Greifringe

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
2.1	8000 200 700	Greifring Edelstahl 20" (451)	1 Stück
2.2	8000 200 701	Greifring Edelstahl 22" (489)	1 Stück
2.3	8000 200 702	Greifring Edelstahl 24" (540)	1 Stück
2.4	8000 200 703	Greifring Edelstahl 26" (590)	1 Stück
2.5	8000 200 710	Greifring Aluminium pulverbeschichtet 20" (451)	1 Stück
2.6	8000 200 711	Greifring Aluminium pulverbeschichtet 22" (489)	1 Stück
2.7	8000 200 712	Greifring Aluminium pulverbeschichtet 24" (540),	1 Stück
2.8	8000 200 713	Greifring Aluminium pulverbeschichtet 26" (590)	1 Stück
2.9	8000 200 720	Greifring Alu. poliert u. harteloxiert 20" (451)	1 Stück
2.10	8000 200 721	Greifring Alu. poliert u. harteloxiert 22" (489)	1 Stück
2.11	8000 200 722	Greifring Alu. poliert u. harteloxiert 24" (540)	1 Stück
2.12	8000 200 723	Greifring Alu. poliert u. harteloxiert 26" (590)	1 Stück
2.13	8000 200 730	Greifring Titan 24" (540)	1 Stück
2.14	8000 200 739	Greifring Ultra-Grip 20" (451)	1 Stück
2.15	8000 200 740	Greifring Ultra-Grip 22" (489)	1 Stück
2.16	8000 200 741	Greifring Ultra-Grip 24" (540)	1 Stück
2.17	8000 200 742	Greifring Ultra-Grip 26" (590)	1 Stück
2.18	8000 200 745	Greifring Ergo-Grip 20"	1 Stück
2.19	8000 200 750	Greifring Ergo-Grip 22" (489)	1 Stück
2.20	8000 200 751	Greifring Ergo-Grip 24" (540)	1 Stück
2.21	8000 200 110	Greifring Dual-Grip 22" (489), harteloxiert	1 Stück
2.22	8000 200 111	Greifring Dual-Grip 24" (540), harteloxiert	1 Stück

## Bereifung

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8000 202 100	20x1" (451-25) Hochdruck-Leichtlaufbereifung, 7,5bar	1 Stück
	8000 202 110	22x1" (489-25) Hochdruck-Leichtlaufbereifung, 7,5bar	1 Stück
	8000 202 120	24x1" (540-25) Hochdruck-Leichtlaufbereifung, 7,5 bar	1 Stück
	8000 202 125	25x1" (559-25) Hochdruck-Leichtlaufbereifung, 7,5bar	1 Stück
	8000 202 130	26x1" (590-25) Hochdruck-Leichtlaufbereifung,7,5bar	1 Stück
	8000 202 260	22x1" (489-25) Hochdruck-Profilbereifung, 7,5bar	1 Stück
	8000 202 270	24x1" (540-25) Hochdruck-Profilbereifung, 7,5bar	1 Stück
	8000 202 300	22x1.3/8" (489-37) Profilbereifung, 4bar	1 Stück
	8000 202 310	24x1.3/8" (540-37) Profilbereifung, 6bar	1 Stück
	8000 202 320	26x1.3/8" (590-37) Profilbereifung, 4bar	1 Stück
	8000 202 510	22x1" Saalsportbereifung Continental	1 Stück
	8000 202 520	24x1" Saalsportbereifung Continental	1 Stück
	8000 202 530	26x1" Saalsportbereifung Continental	1 Stück
	8000 202 610	22x1" Pannensichere Bereifung Farbe: grau	1 Stück
	8000 202 620	24x1" Pannensichere Bereifung Farbe: grau	1 Stück
	8000 202 621	24x1" Pannensichere Bereifung Farbe: schwarz	1 Stück
	8000 202 700	24x2" (507-50) Mountainbike Bereifung "Wild Thing"	1 Stück
	8000 202 720	26x1,9" (559) Mountainbike Bereifung	1 Stück
	8000 202 127	24x1" (540-25) Quick Slick Bereifung Farbe: grau/schwarz	1 Stück
	8000 201 121	24x3/4" (540-20) Bereifung Schwalbe "Speed Air" Farbe:blau	1 Stück
	8000 201 126	26x3/4" (590-20) Bereifung Schwalbe "Speed Air" Farbe: blau	1 Stück
	8000 201 123	24x1" (540-25) Reifen "MARATHON PLUS Evolution" Farbe: schwarz	1 Stück
	8000 201 141	26x1" (559-25) Reifen "MARATHON PLUS Evolution" Farbe: schwarz	1 Stück
	8000 201 124	26x1" (590-25) Reifen "MARATHON PLUS Evolution" Farbe: schwarz	1 Stück
	8000 202 126	24x1" (540-25) Reifen "MARATHON PLUS SmartGuard" Farbe: grau/schwarz	1 Stück
	8000 202 128	26x1" (559-25) Reifen "MARATHON PLUS SmartGuard" Farbe: grau/schwarz	1 Stück
	8000 202 136	26x1" (590-25) Reifen "MARATHON PLUS SmartGuard" Farbe: grau/schwarz	1 Stück

## Schläuche

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8000 201 100	20x1" Hochdruckschlauch (451), 7,5 bar	1 Stück
	8000 201 110	22x1" Hochdruckschlauch (489), 7,5 bar	1 Stück
	8000 201 120	24x1" Hochdruckschlauch (540), 7,5 bar	1 Stück
	8000 201 130	25x1" Hochdruckschlauch (559), 7,5 bar	1 Stück
	8000 201 140	26x1" Hochdruckschlauch (590), 7,5 bar	1 Stück
	8000 201 210	22x1.3/8" Schlauch (489), 4 bar	1 Stück
	8000 201 220	24x1.3/8" Schlauch (549), 6 bar	1 Stück
	8000 201 230	26x1.3/8" Schlauch (590), 4 bar	1 Stück
	8000 201 320	24x1.9" Schlauch (507-47) für MTB-Bereifung	1 Stück

## Greifringüberzüge

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8000 205 209	Greifringüberzug 20", Silicon ohne Struktur	1 Stück
	8000 205 210	Greifringüberzug 22", Silicon ohne Struktur	1 Stück
	8000 205 220	Greifringüberzug 24", Silicon ohne Struktur	1 Stück
	8000 205 230	Greifringüberzug 26", Silicon ohne Struktur	1 Stück

## Speichenschutz

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8000 200 900	Speichenschutz 20", transparent	1 Paar
	8000 200 905	Speichenschutz 22", transparent	1 Paar
	8000 200 910	Speichenschutz 24", transparent	1 Paar
	8000 200 911	Speichenschutz 26", transparent	1 Paar
	8000 200 920	Speichenschutz 20", Motiv "basket"	1 Paar
	8000 200 922	Speichenschutz 22", Motiv "basket"	1 Paar
	8000 200 924	Speichenschutz 24", Motiv "basket"	1 Paar
	8000 200 930	Speichenschutz 20", Motiv "silly bubble"	1 Paar
	8000 200 932	Speichenschutz 22", Motiv "silly bubble"	1 Paar
	8000 200 934	Speichenschutz 24", Motiv "silly bubble"	1 Paar
	8000 200 940	Speichenschutz 20", Motiv "blue sky"	1 Paar
	8000 200 942	Speichenschutz 22", Motiv "blue sky"	1 Paar
	8000 200 944	Speichenschutz 24", Motiv "blue sky"	1 Paar
	8000 200 950	Speichenschutz 20", Motiv "colour stones"	1 Paar
	8000 200 952	Speichenschutz 22", Motiv "colour stones"	1 Paar
	8000 200 954	Speichenschutz 24", Motiv "colour stones"	1 Paar

### Zubehör Antriebsräder

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
	8000 203 100	Pannenschutzeinlageband, Breite 30mm	1 Paar
	8000 203 110	Pannenschutzeinlageband Breite 38mm	1 Paar
	8000 201 800	20" Felgenband	1 Stück
	8000 201 810	22" Felgenband	1 Stück
	8000 201 820	24" Felgenband	1 Stück
	8000 201 830	26" Felgenband	1 Stück
	8000 201 900	Speichenstrahler	1 Stück
	8000 206 400	Tetra Clip für 12mm Achse Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluß	1 Stück

### Naben

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3.1	8000 200 500	Aluminium-Hochflanschnabe schwarz für 12mm Achse 36-Loch mit Lager	1 Stück
3.2	8000 200 501	Aluminium-Hochflanschnabe schwarz für 1/2" Achse 36-Loch mit Lager	1 Stück
3.3	8000 200 502	Aluminium-Hochflanschnabe silber für 12mm Achse 36-Loch mit Lager	1 Stück
3.4	8000 200 503	Aluminium-Hochflanschnabe silber für 1/2" Achse 36-Loch mit Lager	1 Stück
3.5	8000 200 510	Aluminium-Hochflanschnabe schwarz für 12mm Achse 18-Loch mit Lager	1 Stück
3.6	8000 200 511	Aluminium-Hochflanschnabe schwarz für 1/2" Achse 18-Loch mit Lager	1 Stück
3.7	8000 200 512	Aluminium-Hochflanschnabe silber für 12mm Achse 18-Loch mit Lager	1 Stück
3.8	8000 200 513	Aluminium-Hochflanschnabe silber für 1/2" Achse 18-Loch mit Lager	1 Stück
	8000 500 510	Lager 6001 2 RS 1 (für Hochflanschnabe Ø 12mm)	1 Stück
	8000 500 550	Lager Ø 1/2" x 28 x 7 für Hochflanschnabe	1 Stück
	8000 201 350	Distanzring 28 x 8mm	1 Stück
	8000 201 351	Distanzring 12 x 8mm, zur Achsdistanzierung MTB	1 Stück

### Speichen

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
4.1	8000 200 530	Speiche 189 mm mit Nippel (20")	1 Stück
4.2	8000 200 531	Speiche 208 mm mit Nippel (22")	1 Stück
4.3	8000 200 532	Speiche 233 mm mit Nippel (24")	1 Stück
4.4	8000 200 533	Speiche 242 mm mit Nippel (25")	1 Stück
4.5	8000 200 534	Speiche 258 mm mit Nippel (26")	1 Stück

# Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

## 1. Allgemeines

- 1.1 Allen Geschäften liegen die nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Diese gelten auch dann, wenn bei späteren Geschäften auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Sie gehen vom Kunden in Bezug genommenen Bedingungen vor.
- 1.2 Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Geschäftspartners – insbesondere Einkaufsbedingungen – werden von PRO ACTIV nicht anerkannt, es sei denn, PRO ACTIV hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Bedingungen von PRO ACTIV gelten auch dann, wenn PRO ACTIV in Kenntnis entgegenstehender oder von den Bedingungen abweichender Bedingungen des Geschäftspartners die Lieferung an den Geschäftspartner vorbehaltlos ausführt.

## 2. Aufträge, Mindestbestellvolumen

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend.
  - 2.2 Aufträge sind erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung oder Rechnungsstellung durch uns angenommen.
  - 2.3 Änderungswünsche nach Auftragserteilung sind Zusatzaufträge, zu deren Annahme wir nicht verpflichtet sind. Im Falle der Annahme sind diese Änderungswünsche entsprechend der von uns erteilten Auftragsbestätigung gesondert zu vergüten.
  - 2.4 Das Mindestbestellvolumen für Einzelbestellungen beträgt € 25,- netto. Bei Lieferung von Ersatzteilen, die im Bestellwert von unter € 25,- netto liegen, berechnen wir eine gesonderte Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,-.
- ## 3. Preise
- 3.1 An Preisvereinbarungen ist PRO ACTIV 4 Monate nach Abschluss des Vertrages gebunden, wenn die Lieferung innerhalb dieses Zeitraumes erfolgen soll. Andernfalls behält sich PRO ACTIV vor, einen Zuschlag zu den vereinbarten Preisen zu verlangen, wenn und soweit es nach dem Vertragsabschluss zu Lohn-, Fracht- und Steuererhöhungen sowie zu Preissteigerungen bei Lieferanten gekommen ist.
  - 3.2 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarungen ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe bei Vertragsabschluss, bzw. Lieferung, wenn diese länger als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgt, hinzu.

## 4. Versand

- 4.1 Bei Versand geht die Gefahr einschließlich der Gefahr der Beschlagnahme mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer über. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder PRO ACTIV Versendungskosten oder Anfuhr übernommen hat.
- 4.2 Verzögert sich die Versendung aufgrund von Umständen, die der Geschäftspartner zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf diesen über.
- 4.3 Liegen keine besonderen Weisungen des Geschäftspartners vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und Transportmittels durch PRO ACTIV nach bestem Wissen ohne Haftung für billigste oder schnellste Verfrachtung.

## 5. Zahlung

- 5.1 Erfolgt Zahlung vereinbarungsgemäß per Lastschrift einzug durch PRO ACTIV, werden 4% Skonto gewährt, wenn keine betagten Rechnungen offenstehen und die Lastschrift eingelöst wird.
- 5.2 Wird nicht Lastschrifteinzug vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen.
- 5.3 Abweichende Skontoabzüge müssen schriftlich vereinbart werden.
- 5.4 Erfolgt Zahlung in Wechsel oder Scheck, zu deren Annahme PRO ACTIV nicht verpflichtet ist, werden Diskont und Spesen in Rechnung gestellt, ohne Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorzeigung und Protesterhebung. Diese Zahlung erfolgt zahlungshalber, nicht an Erfüllung statt.
- 5.5 Der Käufer kommt durch eine Mahnung nach Fälligkeit in Zahlungsverzug, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung. Wir sind berechtigt, für jede Mahnung € 2,50 zu berechnen. Gerät der Käufer mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, werden alle unsere Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig. Zu weiteren Lieferungen sind wir nur noch gegen Vorauskasse verpflichtet.

## 6. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

- 6.1 Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung. Der Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts gilt nicht, wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 6.2 Soweit der Geschäftspartner Kaufmann ist, steht ihm weder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach § 320 BGB, noch ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB wegen etwaiger Gegenansprüche zu.

## 7. Lieferfrist

- 7.1 Die angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich, ihre Überschreitung berechtigt den Geschäftspartner nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Leistet PRO ACTIV bei Fälligkeit der Leistung nicht, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, wenn PRO ACTIV entgegen einer nach Fälligkeit gesetzten angemessenen Nachfrist nicht liefert.
- 7.2 PRO ACTIV ist zu Teillieferungen und dazu berechtigt, diese getrennt in Rechnung zu stellen.
- 7.3 Bestellungen auf Abruf sind innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsschluss abzunehmen, ohne dass es einer Abnahmeaufforderung oder einer Inverzugsetzung durch PRO ACTIV bedarf. Ist diese Frist abgelaufen, ist PRO ACTIV berechtigt, nach Wahl entweder die Ware in Rechnung zu stellen oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- 7.4 Erklärt der Käufer, die gekaufte Ware nicht abzunehmen oder lässt er eine ihm gesetzte Nachfrist zur Abnahme erfolglos verstreichen, kann PRO ACTIV vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz verlangen.
- 7.5 Als Schadenersatz kann PRO ACTIV 25% des Kaufpreises ohne Abzüge fordern. Dem Käufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns ein Schaden nicht oder in wesentlich geringerer Höhe als die Pauschale entstanden ist. PRO ACTIV bleibt die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten.

## 8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 PRO ACTIV behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor.
- 8.2 Ist der Geschäftspartner Unternehmer, gelten für den Eigentumsvorbehalt zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen 8.3 – 8.9.
- 8.3 Ist der Geschäftspartner Kaufmann, behält sich PRO ACTIV das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor.
- 8.4 Der Kunde ist berechtigt, über die Eigentumsvorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verfügen, sofern nicht zwischen ihm und seinem Kunden hinsichtlich der Forderungen aus der Lieferung ein Abtretungsausschluss vereinbart ist.
- 8.5 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware von PRO ACTIV entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei PRO ACTIV als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt PRO ACTIV Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

- 8.6 Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Geschäftspartner schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils (Ziffer 8.4) zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Geschäftspartner auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe des Forderungsanteils von PRO ACTIV so lange unmittelbar an PRO ACTIV zu bewirken, als noch Forderungen von PRO ACTIV gegen den Geschäftspartner bestehen.

- 8.7 Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die Eigentumsvorbehaltsware vor vollständiger Erfüllung sämtlicher Forderungen von PRO ACTIV weder mit Rechten Dritter zu belasten, noch einem Dritten zur Sicherung übereignen. Er verpflichtet sich, PRO ACTIV sofort zu benachrichtigen, wenn die Ware für Dritte gepfändet oder sonstige Rechte an ihr geltend gemacht werden. Der Geschäftspartner hat PRO ACTIV die zur Wahrung derer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und seine Unterlagen zu getreuen Händen zu überlassen. Sämtliche Interventionskosten trägt der Kunde.

- 8.8 Auf Anforderung ist der Geschäftspartner verpflichtet, die Anschriften seiner Abnehmer und die Höhe der Forderungen mit Rechnungsabschriften mitzuteilen. PRO ACTIV ist berechtigt, dem Abnehmer, die Abtretung offenzulegen.

- 8.9 Übersteigt der Wert der Sicherheiten den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20%, so ist PRO ACTIV auf Verlangen verpflichtet, in Höhe des übersteigenden Wertes Sicherheiten nach eigener Wahl freizugeben.

## 9. Sachmängelhaftung

- 9.1 Liegt ein von PRO ACTIV zu vertretender Mangel vor, kann der Käufer zunächst nur Nacherfüllung, also nach Wahl des Käufers Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. PRO ACTIV kann die vom Käufer gewählte Form der Nacherfüllung verweigern, wenn sie PRO ACTIV nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist, insbesondere aufgrund des Wertes der Sache in mangelfreiem Zustand, der Bedeutung des Mangels und/oder der Frage, ob auf die jeweils andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden kann. In diesem Fall ist der Käufer auf die jeweils andere Ausprägung des Nacherfüllungsanspruchs beschränkt. PRO ACTIV kann auch dieser Art des Nacherfüllungsanspruchs die Einrede der unverhältnismäßigen Kosten entgegenhalten.

- 9.2 Zeigt der Käufer PRO ACTIV einen Mangel an und übt er sein Wahlrecht bezüglich der Art der Nacherfüllung in dieser Anzeige nicht aus, ist PRO ACTIV berechtigt, dem Käufer eine angemessene Frist zur Ausübung seines Wahlrechts zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf die Nacherfüllung nach Wahl von PRO ACTIV vorzunehmen.

- 9.3 Mängelanzeigen und -rügen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt dem Käufer das Recht vorbehalten, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Das Recht des Käufers, Schadenersatz zu verlangen, bleibt nach Maßgabe der Ziffer 10. unberührt.

- 9.4 Werden uns offensichtliche Mängel nicht innerhalb von 14 Tagen nach Wareneingang angezeigt, ist unsere Gewährleistung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn bei Lieferung an einen Unternehmer dieser die bei pflichtgemäßer Untersuchung feststellbaren Mängel nicht innerhalb von 2 Wochen nach Wareneingang schriftlich anzeigt.

- 9.5 Von diesen Regeln wird die Garantie, die PRO ACTIV ggf. dem ersten Verwender der Reha-bilitationsmittel übernimmt, nicht berührt.

## 10. Haftung

- 10.1 Im Falle der Verletzung einer Hauptleistungspflicht durch PRO ACTIV ist bei leichter Fahrlässigkeit die Haftung von PRO ACTIV auf vertragstypische vorhersehbare Schäden begrenzt.

- 10.2 Im Falle von Ziffer 10.1 ist die Haftung von PRO ACTIV zusätzlich auf die Hälfte der Auftrags-summe ohne MwSt. beschränkt.

- 10.3 Für den Fall einer Nebenpflichtverletzung durch PRO ACTIV aufgrund leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit sich diese Pflichtverletzung auf die ordnungsgemäße Erfüllung von Pflichten beziehen, deren ordnungsgemäße Erfüllung die Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte.

- 10.4 Ziffern 10.1 bis 10.3 gelten nicht im Falle von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von PRO ACTIV oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von PRO ACTIV beruhen.

- 10.5 Im Falle einer von PRO ACTIV nicht zu vertretenden Nebenpflichtverletzung ist das Recht des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Nebenpflicht-verletzungen, die in der Lieferung neu hergestellter mangelfreier Sachen bestehen.

## 11. Haftung bei konstruktiven Veränderungen

- 11.1 Für Sonderanfertigungen gelten verschärfte gesetzliche Regelungen. Konstruktive Veränderungen von PRO ACTIV Artikeln durch oder im Auftrag des Geschäftspartners sind nur zulässig, wenn die sicherheitstechnischen Anforderungen eingehalten werden und PRO ACTIV schriftlich eingewilligt hat. Zur Erlangung dieser Einwilligung ist PRO ACTIV ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Wird die Einwilligung nicht eingehalten und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die PRO ACTIV haftet, ist der Geschäftspartner verpflichtet, PRO ACTIV von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen.

## 12. Verwendung von Originalteilen

- 12.1 Nur die Verwendung von PRO ACTIV Originalteilen gewährleistet eine sichere und einwandfreie Funktion unserer Produkte. Nur beim fachgerechten Ein- oder Umbau solcher Originalteile können wir für unsere Produkte Gewähr leisten. Bei Einbau von Nicht-Originalteilen leisten wir keine Gewähr, wir haften auch nicht aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

## 13. Warenrücksendungen

- 13.1 Die Rückgabe von fertigen Endprodukten oder Teilen davon ist ausgeschlossen, sofern der Geschäftspartner kein Recht zum Rücktritt des Vertrages hat.
- 13.2 Sofern PRO ACTIV in Einzelfällen, insbesondere aus therapeutischen Gründen, geänderten Anforderungen oder Todesfällen eine anders lautende Entscheidung trifft, gilt:
  - a) Für unbenutzte, neuwertige Teile, deren Lieferung höchstens 1 Monat zurückliegt, werden 90% des Lieferpreises;
  - b) bei Rücknahme bis 3 Monate nach Liefertermin 70% des Lieferpreises; erstattet.

- 13.3 Sonderanfertigungen und Artikel unter einem Verkaufspreis von € 50,- sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Ältere Lieferungen, auch wenn sie als Ware unbenutzt geblieben sind, werden nicht zurückgenommen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Liefer-scheins oder der Rechnung.

## 14. Erfüllungsort / Gerichtsstand

- 14.1 Erfüllungsort ist 72359 Dotternhausen und Gerichtsstand ist das für 72359 Dotternhausen zuständige Gericht, sofern der Geschäftspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Im übrigen ist der Gerichtsstand für Klagen gegen den Geschäftspartner 72359 Dotternhausen, wenn der Geschäftspartner nach Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt hat, bzw. seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

- 14.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.



PRO ACTIV Reha - Technik GmbH  
Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Telefon +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de